

Manuel d'utilisation

Matelas anti escarre avec moteur AERIO

Référence :

AERIO

Classification: Dispositif Médical – Classe I

Garantie 2 ans



IMPORTANT

⚠ Lire attentivement ce manuel avant la première utilisation.

- Vérifier l'intégrité du matelas, des cellules et des tuyaux avant chaque mise en service.
- Toujours s'assurer que le matelas est correctement gonflé avant d'installer le patient.
- Utiliser exclusivement avec une source d'air compatible.
- Ce produit est réservé à un usage humain.
- En cas de doute sur l'état du produit ou sur son utilisation, ne pas l'utiliser et contacter le fournisseur.

DESTINATION DU PRODUIT

Le matelas anti-escarres à air est un dispositif médical d'aide à la prévention et au traitement des escarres (plaies de pression), destiné aux personnes présentant un risque lié à :

- L'alitement prolongé
- La mobilité réduite ou inexistante
- Un état de santé nécessitant un maintien prolongé en position couchée

Le produit est destiné à être utilisé :

- À domicile
- En établissements de soins (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, centres de rééducation)

Ce matelas est conçu pour être installé sur un matelas standard et utilisé en complément d'un suivi médical adapté.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Pour garantir la sécurité du patient et la durabilité du produit, respecter impérativement les précautions suivantes :

Sécurité du patient

- Ne jamais utiliser le matelas sur une surface coupante ou abrasive.
- Ne pas placer le patient sur le matelas lorsque celui-ci est dégonflé.
- Ne pas modifier la structure du matelas (perçage, découpe, ajout d'accessoires non prévus).
- Surveiller régulièrement l'état cutané du patient, même avec l'utilisation du matelas.

Utilisation correcte

- Ne pas dépasser la charge maximale recommandée par le fabricant.
- Ne pas utiliser en cas de fuite importante ou de dégonflage anormal.
- Ne pas utiliser le matelas à proximité de flammes, de cigarettes allumées ou de sources de chaleur.

1. Introduction

Le matelas anti-escarres à air est un dispositif médical destiné à la prévention et à l'aide au traitement des escarres chez les personnes alitées ou à mobilité réduite.

Grâce à sa structure composée de cellules d'air interconnectées, il permet une répartition homogène des pressions, réduit les points d'appui prolongés et améliore le confort du patient.

Ce matelas est conçu pour être utilisé :

- À domicile
- En établissement de soins (hôpitaux, cliniques, EHPAD)
- En soins de longue durée

Il doit être utilisé sur un matelas standard et ne remplace pas la surveillance médicale.

2. Contenu de la boîte

À l'ouverture de l'emballage, vérifier la présence des éléments suivants :

1 matelas anti-escarres à cellules d'air

1 tuyau de raccordement à air

1 kit de réparation (patchs + colle)

1 notice d'utilisation (ce document)

⚠ En cas de pièce manquante ou endommagée, ne pas utiliser le produit et contacter le fournisseur.



3. Mise en place et utilisation

3.1 Installation du matelas

Poser le matelas anti-escarres sur un matelas classique, les cellules d'air orientées vers le haut.

Aligner correctement le matelas afin qu'il couvre toute la surface de couchage.

Fixer le matelas si nécessaire à l'aide des rabats ou sangles (si présents).

Raccorder le tuyau de sortie d'air du matelas à la source d'air prévue (pompe ou système compatible).

3.2 Mise en service

Mettre en marche la source d'air.

Laisser le matelas se gonfler complètement avant d'installer le patient.

Vérifier que les cellules sont correctement gonflées et réparties uniformément.

Installer le patient délicatement sur le matelas.

3.3 Utilisation quotidienne

Vérifier régulièrement la pression et l'état des cellules.

Ajuster la pression selon le confort et le poids du patient (si le système le permet).

Le matelas peut être utilisé en continu, jour et nuit.

⚠ Ne jamais poser le patient sur un matelas non gonflé.

4. Entretien et maintenance

4.1 Nettoyage

Débrancher le matelas avant toute opération.

Nettoyer la surface avec un chiffon doux, de l'eau tiède et un détergent doux.

Désinfecter si nécessaire avec un produit compatible avec le PVC médical.

Laisser sécher complètement à l'air libre.

✗ Ne pas immerger

✗ Ne pas utiliser de solvants ou produits abrasifs

4.2 Maintenance

Inspecter régulièrement les cellules d'air et les tuyaux.

En cas de micro-perforation, utiliser le kit de réparation fourni.

Ne pas tenter de réparer une fuite importante : remplacer le matelas.

5. Changement de propriétaire

En cas de cession, prêt ou revente du matelas :

- Nettoyer et désinfecter intégralement le produit.
- Fournir ce manuel au nouveau propriétaire.
- Vérifier l'état général et l'étanchéité avant toute réutilisation.

6. Recyclage et fin de vie

Le matelas est principalement composé de matériaux plastiques (PVC).

- Ne pas jeter avec les ordures ménagères.
- Déposer le produit dans un centre de collecte ou de recyclage agréé.
- Respecter la réglementation locale relative aux dispositifs médicaux usagés.

7. Stockage

- Stocker dans un endroit sec, propre et ventilé.
- Température recommandée : entre 5 °C et 40 °C.
- Éviter l'exposition directe au soleil, à l'humidité ou à des sources de chaleur.
- Ne pas poser d'objets lourds sur le matelas plié.

8. Durée d'utilisation

La durée de vie moyenne du matelas est de 2 à 3 ans, sous réserve :

- D'une utilisation conforme aux recommandations
- D'un entretien régulier
- De l'absence de détérioration majeure
- Un contrôle visuel fréquent permet de garantir la sécurité et l'efficacité du produit.