

Manuel d'utilisation

Chaise de douche BAHIA-WH

Référence :

BAHIA-WH

Classification: Dispositif Médical – Classe I

Garantie 2 ans



IMPORTANT

Lire attentivement la notice avant toute utilisation de ce produit et la conserver en cas de besoin. Utilisateur : si vous êtes dans l'incapacité de lire ou de comprendre les avertissements, précautions ou instructions, veuillez contacter votre professionnel de santé ou distributeur avant d'utiliser ce produit sous peine de risques et de dommages. Consulter votre médecin ou spécialiste de santé avant d'utiliser un dispositif d'aide technique. Il vous conseillera et informera sur l'utilisation la plus appropriée à votre cas. Distributeur : cette notice doit être remise aux utilisateurs de ce produit.

DESTINATION DU PRODUIT

La chaise de douche BAHIA-WH est un dispositif médical. C'est une aide technique à la toilette qui s'adresse aux personnes âgées, à mobilité réduite, handicapées, blessées ou qui peuvent perdre facilement l'équilibre

Il est conçu pour une utilisation exclusivement en intérieur, dans un environnement humide tel que la salle de bain, hors immersion.

⚠ Son utilisation est strictement réservée à la douche et ne doit en aucun cas être utilisée dans une baignoire.


PRECAUTIONS D'EMPLOI

Le non-respect des précautions d'emploi peut entraîner des risques de blessures graves.


- Ne jamais dépasser le poids maximum supporté de 100 kg.
- Assurez-vous que tous les composants sont sécurisés avant utilisation.
- Assurez-vous que le produit soit en bon état de fonctionnement.
- Contrôlez visuellement le produit.
- Avant chaque utilisation du produit, l'état de l'assise et du dossier doit être vérifié.
- Vérifiez la stabilité du produit avant utilisation.
- Utilisez uniquement sur un sol plat.
- Ne vous penchez jamais lorsque vous êtes sur le produit.
- En cas de pièces abimées, cassées, usées ou manquantes, contactez le revendeur.

ASSEMBLAGE


1. Poser le panneau du siège à plat.
Flèche vers l'avant

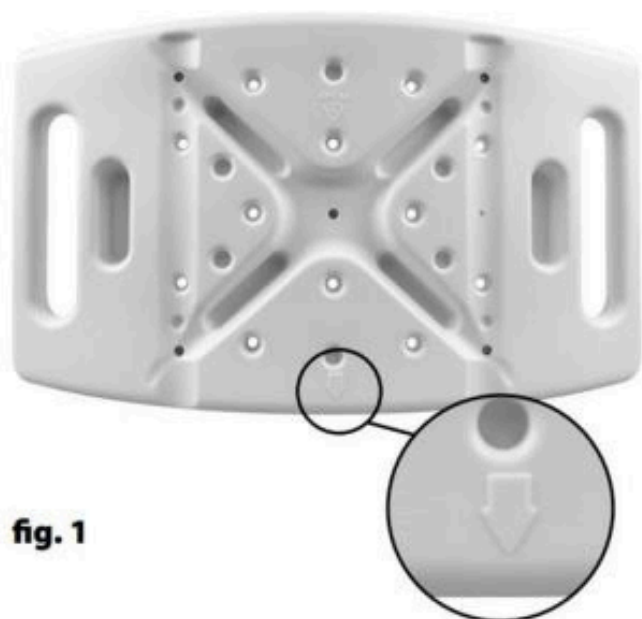


2. Identifier l'ensemble de pieds A
(dessus plat et découpe sous le tube)

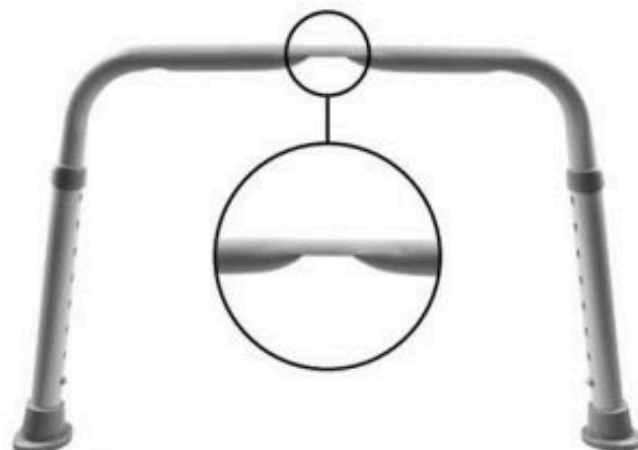


3. Identifier l'ensemble de pieds B
(découpe sur le dessus du tube, dessous plat)

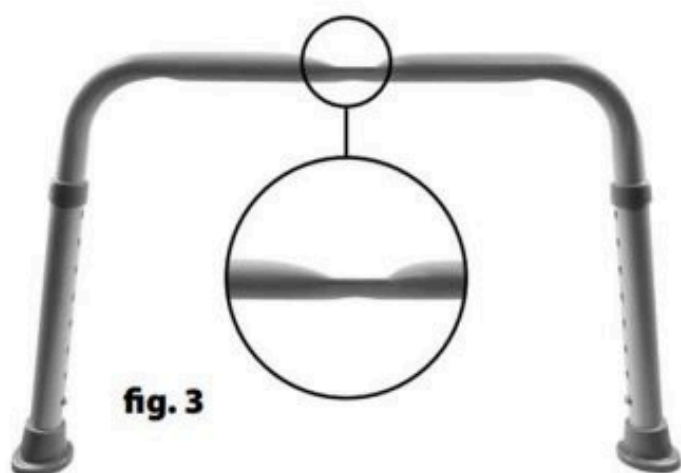


4. Placer l'ensemble de pieds A sur le panneau du siège, placer l'ensemble de pieds B dessus et fixer l'ensemble avec une vis M6 35mm et une rondelle voûtée

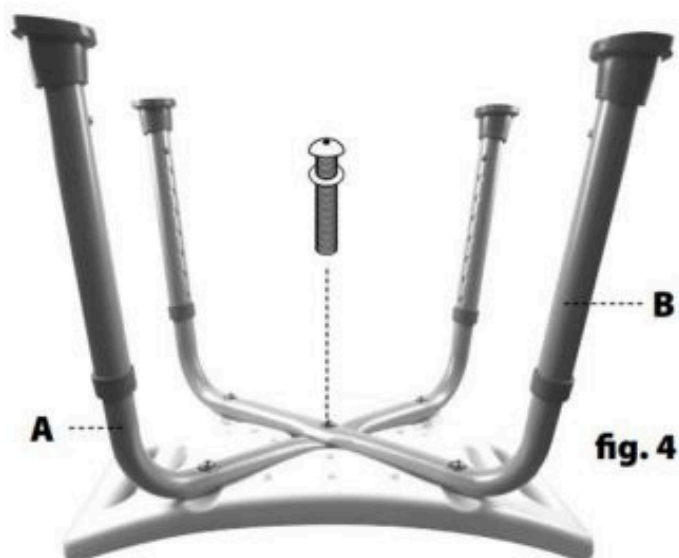

5. Fixer les bras de dossier au dossier à l'aide de 4 vis M6 30 mm et 4 rondelles voûtées

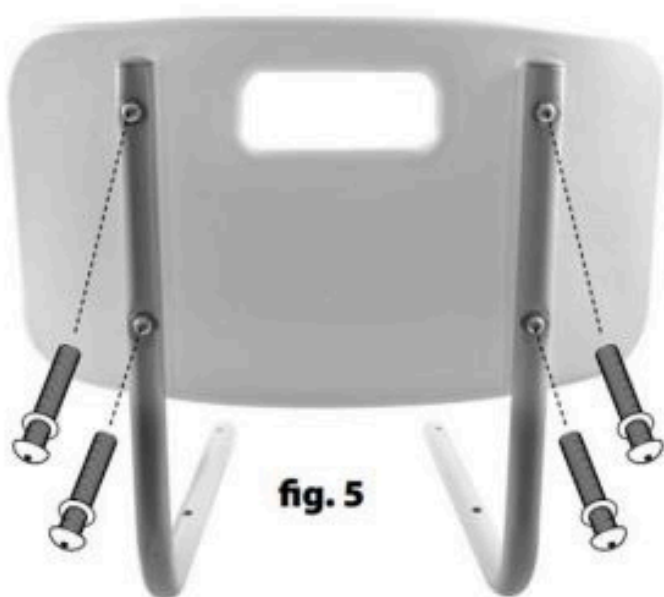

6. Fixer le dossier assemblé au siège à l'aide de 4 vis M6 55mm et 4 rondelles voûtées

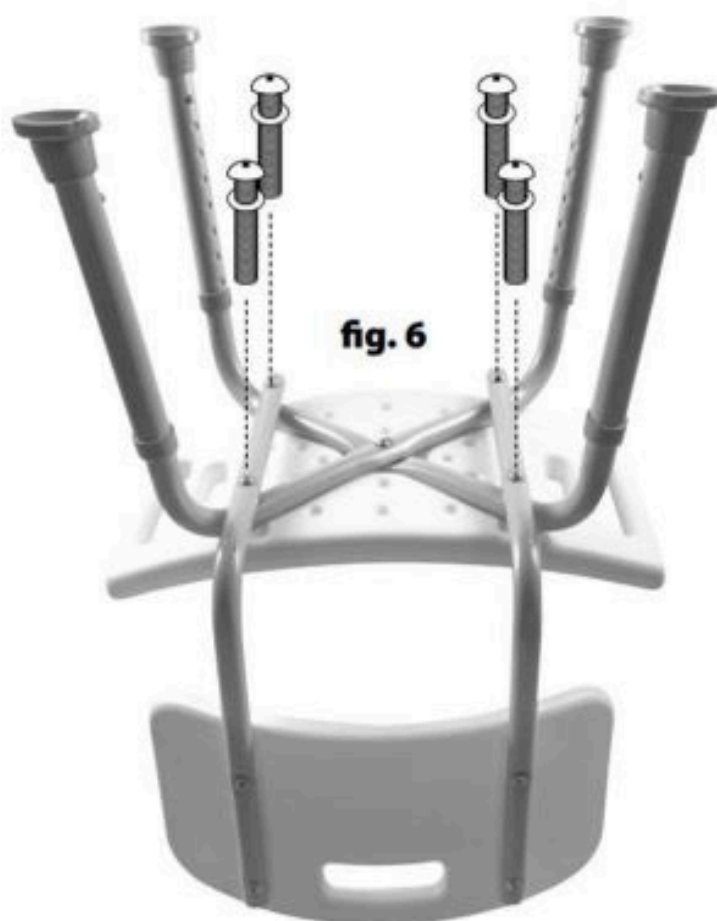

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

Appuyez sur la goupille de fixation et tournez le pied sur le côté afin de le faire glisser vers le haut ou vers le bas jusqu'à la hauteur désirée. Répétez l'opération pour chaque pied, en vous assurant que les quatre pieds sont réglés à la même hauteur.

NETTOYAGE

Tous les composants du produit sont fabriqués à partir de matériaux de qualité. Cependant, il est important de nettoyer vos chaises et tabourets de douche uniquement avec un nettoyant non abrasif ou un détergent doux avec un chiffon doux. Ne pas dépasser 50 °C lors du nettoyage du siège car cela endommagerait définitivement le plastique.

N.B. : Un nettoyage quotidien régulier réduira l'accumulation de calcaire sur votre produit. Remplacez toutes les pièces usées, manquantes ou endommagées si nécessaire, en contactant votre fournisseur.