

Manuel d'utilisation

Tabouret de douche BORA-BK

Référence :

BORA - BK

Classification: Dispositif Médical – Classe I

Garantie 2 ans



IMPORTANT

Lire attentivement la notice avant toute utilisation de ce produit et la conserver en cas de besoin.

Utilisateur : si vous êtes dans l'incapacité de lire ou de comprendre les avertissements, précautions ou instructions, veuillez contacter votre professionnel de santé ou distributeur avant d'utiliser ce produit sous peine de risques et de dommages. Consulter votre médecin ou spécialiste de santé avant d'utiliser un dispositif d'aide technique. Il vous conseillera sur son utilisation la plus appropriée à votre cas. Distributeur : cette notice doit être remise aux utilisateurs de ce produit.

DESTINATION DU PRODUIT

Tabouret de douche BORA-BK est un dispositif médical destiné à faciliter la toilette des personnes en situation de fragilité ou à mobilité réduite.

Elle est conçue pour une utilisation exclusivement en intérieur, dans un environnement humide tel que la salle de bain, hors immersion.

⚠ Son utilisation est strictement réservée à un usage en douche et ne doit en aucun cas être utilisée dans une baignoire.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Le non-respect des précautions d'emploi peut entraîner des risques de blessures graves.

- Ne dépassez pas la charge maximale autorisée de 136 kg
- Assurez-vous que la planche soit correctement installée et solidement fixée avant chaque utilisation
- Vérifiez la stabilité du produit avant de vous asseoir
- Utiliser uniquement sur une baignoire standard compatible
- Ne jamais se tenir debout sur la planche
- Ne pas sauter ou s'asseoir brusquement sur la planche
- En cas de pièces abîmées, cassées, usées ou manquantes, contactez le revendeur
- Ne pas utiliser le produit sans la poignée si celle-ci est prévue sur le modèle



Assemblage et utilisation

- Déballez soigneusement et examinez le produit pour vous assurer qu'il est complet.
- Avant l'utilisation, vérifiez tout signe de dommages, par exemple la soudure fissurée, l'écaillé de peinture, l'assise fissurée ou endommagée ou les tubes pliés. Si vous repérez l'un de ces problèmes, veuillez-nous contacter et vous abstenir d'utiliser le produit.
- Installer et fixer les tubes en aluminium avec les molettes fournies (dont 4 molettes grises courtes et 1 molette bleue longue pour la jonction des tubes)
- Monter les 4 pieds et régler le tabouret à la hauteur voulue.
- Toutes les fixations doivent être correctement serrées et régulièrement vérifiées.
- Assurez-vous que les doigts de verrouillage des rallonges de pied soient correctement enclenchés.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions :

- Hauteur hors tout réglable : 350 à 530 mm
- Largeur hors tout : 420 mm
- Largeur de l'assise : 485 mm

Autres caractéristiques :

- Poids net : 1,8 kg
- Poids maximal supporté : 100 kg
- Réglage de la hauteur : 8 niveaux
- Angle de l'assise : 9°

QUE CONTIENT LA BOÎTE ?

La boîte contient :

- 1 assise de tabouret de douche
- 4 pieds réglables en hauteur
- 4 embouts en caoutchouc antidérapants
- 1 notice d'utilisation

COMMENT FONCTIONNE ?

Réglage de la hauteur du tabouret de douche

Pour régler la hauteur du tabouret, vous devez ajuster la longueur de tous les pieds à la valeur souhaitée. Pour régler la longueur d'un seul pied, appuyez sur le bouton situé à l'intérieur du tabouret et tournez légèrement le pied. Faites glisser le tube du pied jusqu'au réglage souhaité et tournez-le de manière à ce que le bouton ressorte. Tous les pieds doivent être réglés à la même hauteur.

ENTRETIEN – MAINTENANCE

L'absence d'entretien peut entraîner des risques de blessures graves.

- Nettoyer régulièrement avec de l'eau tiède et un chiffon doux
- Ne pas utiliser de produits abrasifs, détergents ou solvants
- Sécher soigneusement après nettoyage
- Ne jamais réparer le produit soi-même
- Contacter un revendeur ou un professionnel agréé en cas de dysfonctionnement

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

Le produit peut être réutilisé.

Il doit être nettoyé et désinfecté avant toute nouvelle utilisation.

Lors du transfert du produit, tous les documents techniques doivent être remis au nouvel utilisateur.

Une inspection préalable par un spécialiste est recommandée.

STOCKAGE

- Stocker le produit dans un endroit sec et tempéré
- Ne pas exposer à une source de chaleur ou de froid extrême
- Protéger de la poussière, de l'humidité et de la corrosion
- Ne pas poser d'objets lourds sur le produit

RECYCLAGE

Lorsque le produit devient inutilisable, veuillez contacter votre revendeur spécialisé ou votre service local de gestion des déchets pour connaître les modalités de recyclage.

DURÉE D'UTILISATION

La durée de vie prévue de ce produit est de 5 ans, dans des conditions normales d'utilisation, de sécurité et d'entretien.

Au-delà de cette période, le produit peut être utilisé tant qu'il reste en bon état.