

## Manuel d'utilisation

Chaise de douche BORA-WH

### Référence :

BORA- WH

Classification: Dispositif Médical – Classe I

Garantie 2 ans



## IMPORTANT

Lire attentivement la notice avant toute utilisation de ce produit et la conserver en cas de besoin.

Utilisateur : si vous êtes dans l'incapacité de lire ou de comprendre les avertissements, précautions ou instructions, veuillez contacter votre professionnel de santé ou distributeur avant d'utiliser ce produit sous peine de risques et de dommages. Consulter votre médecin ou spécialiste de santé avant d'utiliser un dispositif d'aide technique. Il vous conseillera sur son utilisation la plus appropriée à votre cas. Distributeur : cette notice doit être remise aux utilisateurs de ce produit.

## DESTINATION DU PRODUIT

Tabouret de douche BORA-WH est un dispositif médical destiné à faciliter la toilette des personnes en situation de fragilité ou à mobilité réduite.

Elle est conçue pour une utilisation exclusivement en intérieur, dans un environnement humide tel que la salle de bain, hors immersion.

⚠ Son utilisation est strictement réservée à la douche et il ne doit en aucun cas être utilisé dans une baignoire

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Le non-respect des précautions d'emploi peut entraîner des risques de blessures graves.

- Ne dépassez pas la charge maximale autorisée de 136 kg
- Assurez-vous que la planche soit correctement installée et solidement fixée avant chaque utilisation
- Vérifiez la stabilité du produit avant de vous asseoir
- Utiliser uniquement sur une baignoire standard compatible
- Ne jamais se tenir debout sur la planche
- Ne pas sauter ou s'asseoir brusquement sur la planche
- En cas de pièces abîmées, cassées, usées ou manquantes, contactez le revendeur
- Ne pas utiliser le produit sans la poignée si celle-ci est prévue sur le modèle

## Description du produit

Le tabouret de douche est conçu pour les personnes qui ont besoin d'un soutien pendant la douche ou le bain. Le tabouret a une structure en aluminium avec des pieds réglables en hauteur et une assise en plastique blanc.

### Le produit est composé des éléments suivants :

1. Siège
2. Pieds réglables en hauteur
3. Embout en caoutchouc antidérapant



### Description de l'assemblage

Placez le siège blanc à l'envers. Montez les tubes du cadre sur le siège en veillant à placer un tube en croix sous l'autre. Insérez une vis avec une rondelle métallique dans le trou du milieu, puis les 4 autres vis de la même manière dans les 4 trous de la face inférieure du siège et serrez les vis. Faites glisser les pieds sur les tubes du cadre de manière à ce que les boutons sortent. Vérifiez que tous les pieds soient fermes et stables en plaçant le tabouret sur une surface plane. Vérifiez et ajustez les pieds à la hauteur souhaitée, en vous assurant qu'ils soient réglés à la même hauteur et qu'ils soient tous solidement verrouillés.

# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

## Dimensions :

- Hauteur hors tout réglable : 350 à 530 mm
- Largeur hors tout : 420 mm
- Largeur de l'assise : 485 mm

## Autres caractéristiques :

- Poids net : 1,8 kg
- Poids maximal supporté : 100 kg
- Réglage de la hauteur : 8 niveaux
- Angle de l'assise : 9°

## QUE CONTIENT LA BOÎTE ?

### La boîte contient :

- 1 assise de tabouret de douche
- 4 pieds réglables en hauteur
- 4 embouts en caoutchouc antidérapants
- 1 notice d'utilisation

## COMMENT FONCTIONNE ?

### Réglage de la hauteur du tabouret de douche

Pour régler la hauteur du tabouret, vous devez ajuster la longueur de tous les pieds à la valeur souhaitée. Pour régler la longueur d'un seul pied, appuyez sur le bouton situé à l'intérieur du tabouret et tournez légèrement le pied. Faites glisser le tube du pied jusqu'au réglage souhaité et tournez-le de manière à ce que le bouton ressorte. Tous les pieds doivent être réglés à la même hauteur.

## ENTRETIEN – MAINTENANCE

L'absence d'entretien peut entraîner des risques de blessures graves.

- Nettoyer régulièrement avec de l'eau tiède et un chiffon doux
- Ne pas utiliser de produits abrasifs, détergents ou solvants
- Sécher soigneusement après nettoyage
- Ne jamais réparer le produit soi-même
- Contacter un revendeur ou un professionnel agréé en cas de dysfonctionnement

## CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

Le produit peut être réutilisé.

Il doit être nettoyé et désinfecté avant toute nouvelle utilisation.

Lors du transfert du produit, tous les documents techniques doivent être remis au nouvel utilisateur.

Une inspection préalable par un spécialiste est recommandée.

## STOCKAGE

- Stocker le produit dans un endroit sec et tempéré
- Ne pas exposer à une source de chaleur ou de froid extrême
- Protéger de la poussière, de l'humidité et de la corrosion
- Ne pas poser d'objets lourds sur le produit

## RECYCLAGE

Lorsque le produit devient inutilisable, veuillez contacter votre revendeur spécialisé ou votre service local de gestion des déchets pour connaître les modalités de recyclage.

## DURÉE D'UTILISATION

La durée de vie prévue de ce produit est de 5 ans, dans des conditions normales d'utilisation, de sécurité et d'entretien.

Au-delà de cette période, le produit peut être utilisé tant qu'il reste en bon état.