

Manuel d'utilisation

Chaise de douche CAPRI

Référence :

CAPRI

Classification: Medical device Class I

Garantie 2 ans



IMPORTANT

Lire attentivement la notice avant toute utilisation de ce produit et la conserver en cas de besoin.

Utilisateur : si vous êtes dans l'incapacité de lire ou de comprendre les avertissements, précautions ou instructions, veuillez contacter votre professionnel de santé ou distributeur avant d'utiliser ce produit sous peine de risques et de dommages. Consulter votre médecin ou spécialiste de santé avant d'utiliser un dispositif d'aide technique. Il vous conseillera sur son utilisation la plus appropriée à votre cas. Distributeur : cette notice doit être remise aux utilisateurs de ce produit.

DESTINATION DU PRODUIT

Le tabouret de douche CAPRI est un dispositif médical conçu pour faciliter la toilette des patients, notamment des personnes âgées ou à mobilité réduite.

Il est destiné à un usage en intérieur, dans un environnement humide tel que la salle de bain, hors immersion.

⚠ Son utilisation est strictement réservée à la douche et il ne doit en aucun cas être utilisé dans une baignoire.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Le non-respect des précautions d'emploi peut entraîner des risques de blessures graves.

- Ne dépassez pas la charge maximale autorisée de 100 kg
- Assurez-vous que le produit soit en bon état de fonctionnement avant chaque utilisation
- Vérifiez que toutes les molettes de serrage soient correctement serrées
- Vérifiez que les quatre pieds soient réglés à la même hauteur
- Assurez-vous que les embouts en caoutchouc soient correctement positionnés
- Ne jamais se tenir debout sur le tabouret
- Ne pas déplacer le tabouret lorsque l'utilisateur est assis
- En cas de pièces abîmées, cassées, usées ou manquantes, contactez le revendeur
- Attention au risque de pincement lors du réglage de la hauteur

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions :

- Hauteur hors tout réglable : 350 à 580 mm
- Largeur hors tout : 320 mm
- Diamètre de l'assise : 320 mm

Autres caractéristiques :

- Poids net : 1,4 kg
- Poids maximal supporté : 100 kg
- Réglage de la hauteur : 8 niveaux
- Assise pivotante à 360°



QUE CONTIENT LA BOÎTE ?

La boîte contient :

- 1 assise pivotante
- 4 pieds réglables en hauteur
- 4 patins en caoutchouc antidérapants
- 1 notice d'utilisation

COMMENT MONTER ?

Le montage est simple et ne nécessite aucun outil.

- Insérer les quatre pieds dans la structure du tabouret
- Régler la hauteur souhaitée à l'aide du système de réglage
- Vérifier que chaque réglage est correctement verrouillé
- S'assurer que les patins en caoutchouc sont bien en contact avec le sol





1. Assise confortable et antidérapante

L'assise est conçue pour offrir un confort optimal lors de la toilette.

Sa surface antidérapante limite les risques de glissade et permet une utilisation sécurisée en milieu humide.

La forme circulaire favorise une position assise stable et ergonomique.

2. Structure renforcée – Installation sans outil

La structure du tabouret est équipée d'un système de fixation robuste, assurant une excellente stabilité.

L'assemblage s'effectue sans outil, grâce à un système de montage simple et intuitif, permettant une mise en service rapide du produit.



3. Réglage facile de la hauteur

Le tabouret dispose d'un réglage de la hauteur par système de verrouillage à bouton-poussoir.

Ce dispositif permet d'ajuster la hauteur du tabouret selon la morphologie de l'utilisateur et la configuration de la salle de bain.

Les trous de réglage assurent un positionnement précis et sécurisé.

4. Embouts en caoutchouc antidérapants

Les pieds du tabouret sont munis de patins en caoutchouc antidérapants, assurant une excellente adhérence sur sol mouillé.

Ils contribuent à la stabilité du produit et réduisent les risques de glissement pendant l'utilisation.



ENTRETIEN – MAINTENANCE

L'absence d'entretien peut entraîner des risques de blessures graves.

- Nettoyer régulièrement le produit avec de l'eau tiède et un chiffon doux
- Ne pas utiliser de produits abrasifs, détergents ou solvants
- Sécher avec un chiffon propre et sec après nettoyage
- En cas de dysfonctionnement, ne pas réparer le produit soi-même
- Consulter un revendeur ou un professionnel agréé si nécessaire

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

Le produit peut être réutilisé.

Il doit être nettoyé et désinfecté avant toute nouvelle utilisation.

Lors du transfert du produit, tous les documents techniques doivent être remis au nouvel utilisateur.

Une inspection préalable par un spécialiste est recommandée.

STOCKAGE

- Stocker le produit dans un endroit sec et tempéré
- Ne pas exposer à une source de chaleur ou de froid extrême
- Protéger de la poussière, de l'humidité et de la corrosion
- Ne pas poser d'objets lourds sur le produit

RECYCLAGE

Lorsque le produit devient inutilisable, veuillez contacter votre revendeur spécialisé ou votre service local de gestion des déchets pour connaître les modalités de recyclage.

DURÉE D'UTILISATION

La durée de vie prévue de ce produit est de 5 ans, dans des conditions normales d'utilisation, de sécurité et d'entretien.

Au-delà de cette période, le produit peut être utilisé tant qu'il reste en bon état.