

Manuel d'utilisation

Tabouret de douche Cascada

Référence :

Cascada

Classification: Dispositif Médical – Classe I

Garantie 2 ans



IMPORTANT

Lire attentivement la notice avant toute utilisation de ce produit et la conserver en cas de besoin.

Utilisateur : si vous êtes dans l'incapacité de lire ou de comprendre les avertissements, précautions ou instructions, veuillez contacter votre professionnel de santé ou distributeur avant d'utiliser ce produit sous peine de risques et de dommages. Consulter votre médecin ou spécialiste de santé avant d'utiliser un dispositif d'aide technique. Il vous conseillera sur son utilisation la plus appropriée à votre cas. Distributeur : cette notice doit être remise aux utilisateurs de ce produit.

DESTINATION DU PRODUIT

Le tabouret de douche CASCADA est un dispositif destiné à faciliter la toilette des personnes en situation de fragilité, de perte d'équilibre ou à mobilité réduite.


Il est conçu pour une utilisation exclusivement en intérieur, dans un environnement humide tel que la salle de bain, hors immersion.

⚠ Son utilisation est strictement réservée à la douche et ne doit en aucun cas être utilisée dans une baignoire.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Le non-respect des précautions d'emploi peut entraîner des risques de blessures graves.

- Ne pas dépasser la charge maximale autorisée de 100 kg
- S'assurer que le tabouret est correctement monté et stable avant chaque utilisation
- Vérifier la stabilité du produit avant de s'asseoir
- Utiliser uniquement en douche, sur une surface plane et antidérapante
- Ne jamais se tenir debout sur le tabouret
- Ne pas sauter ou s'asseoir brusquement sur l'assise
- En cas de pièces abîmées, cassées, usées ou manquantes, cesser l'utilisation et contacter le revendeur
- Ne pas utiliser le produit sans les accoudoirs lorsqu'ils sont nécessaires au maintien de l'utilisateur

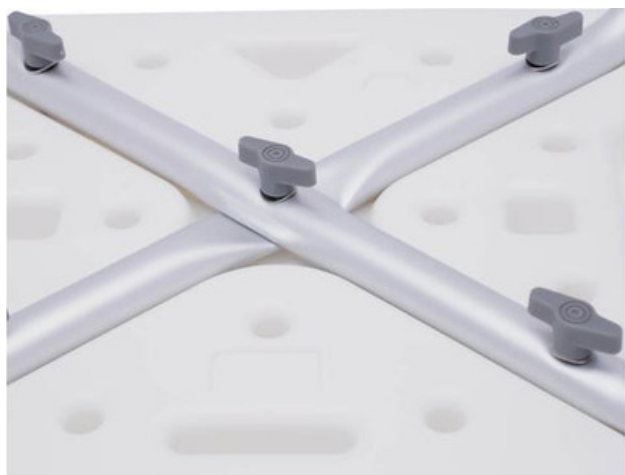

Rivetage fin : Nous adoptons une technologie de rivetage fin pour la connexion, ce qui rend le tabouret de douche plus solide et plus sûr à l'usage.

Grand repose-pieds à succion : Les pieds du tabouret sont dotés de quatre grandes ventouses qui permettent de l'absorber fermement au sol sans qu'il ne tombe et il est réglable sur 6 positions pour s'adapter à toutes les tailles, afin que vous puissiez prendre une douche en toute sécurité.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions :

- Hauteur hors tout réglable : 410 à 550 mm
- Largeur hors tout : 490 mm
- Largeur de l'assise : 410 mm

Autres caractéristiques :

- Poids net : 2,4 kg
- Poids maximal supporté : 100 kg
- Réglage de la hauteur : 6 niveaux
- Accoudoirs : rembourrés et amovibles
- Assise : avec trous de drainage antidérapants

QUE CONTIENT LA BOÎTE ?

La boîte contient :

- 1 assise de tabouret de douche Cascada
- 4 pieds réglables en hauteur
- 4 embouts en caoutchouc antidérapants
- 2 accoudoirs rembourrés et amovibles
- 1 notice d'utilisation

COMMENT FONCTIONNE ?

Réglage de la hauteur du tabouret de douche Cascada

Pour régler la hauteur du tabouret de douche Cascada, vous devez ajuster la longueur de tous les pieds à la valeur souhaitée. Pour régler la longueur d'un seul pied, appuyez sur le bouton situé sur le tube du pied et tournez légèrement le pied. Faites glisser le tube du pied jusqu'au réglage souhaité, puis tournez-le de manière à ce que le bouton ressorte. Tous les pieds doivent être réglés à la même hauteur.



ENTRETIEN – MAINTENANCE

L'absence d'entretien peut entraîner des risques de blessures graves.

- Nettoyer régulièrement avec de l'eau tiède et un chiffon doux
- Ne pas utiliser de produits abrasifs, détergents ou solvants
- Sécher soigneusement après nettoyage
- Ne jamais réparer le produit soi-même
- Contacter un revendeur ou un professionnel agréé en cas de dysfonctionnement

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

Le produit peut être réutilisé.

Il doit être nettoyé et désinfecté avant toute nouvelle utilisation.

Lors du transfert du produit, tous les documents techniques doivent être remis au nouvel utilisateur.

Une inspection préalable par un spécialiste est recommandée.

STOCKAGE

- Stocker le produit dans un endroit sec et tempéré
- Ne pas exposer à une source de chaleur ou de froid extrême
- Protéger de la poussière, de l'humidité et de la corrosion
- Ne pas poser d'objets lourds sur le produit

RECYCLAGE

Lorsque le produit devient inutilisable, veuillez contacter votre revendeur spécialisé ou votre service local de gestion des déchets pour connaître les modalités de recyclage.

DURÉE D'UTILISATION

La durée de vie prévue de ce produit est de 5 ans, dans des conditions normales d'utilisation, de sécurité et d'entretien.

Au-delà de cette période, le produit peut être utilisé tant qu'il reste en bon état.