

Manuel d'utilisation

Chaise garde de robe Confort

Référence :

Confort

Classification: Dispositif Médical – Classe I

Garantie 2 ans



IMPORTANT

Lire attentivement la notice avant toute utilisation de ce produit et la conserver en cas de besoin. Utilisateur : si vous êtes dans l'incapacité de lire ou de comprendre les avertissements, précautions ou instructions, veuillez contacter votre professionnel de santé ou distributeur avant d'utiliser ce produit sous peine de risques et de dommages. Consulter votre médecin ou spécialiste de santé avant d'utiliser un dispositif d'aide technique. Il vous conseillera et informera sur l'utilisation la plus appropriée à votre cas. Distributeur : cette notice doit être remise aux utilisateurs de ce produit.

DESTINATION DU PRODUIT

La chaise de toilette confort est un dispositif médical. C'est une aide technique à la toilette qui s'adresse aux personnes âgées, à mobilité réduite, handicapées, blessées ou qui peuvent perdre facilement l'équilibre.


PRECAUTIONS D'EMPLOI

Le non-respect des précautions d'emploi peut entraîner des risques de blessures graves.

- Ne jamais dépasser le poids maximum supporté de 130 kg.
- Assurez-vous que tous les composants sont sécurisés avant utilisation.
- Assurez-vous que le produit soit en bon état de fonctionnement.
- L'appareil ne convient pas aux utilisateurs qui ne peuvent pas s'asseoir et se tenir debout normalement.
- Contrôlez visuellement le produit.
- Vérifiez la stabilité de la chaise avant utilisation.
- Utilisez uniquement sur un sol plat.
- Ne vous penchez jamais lorsque vous êtes sur la chaise.
- Veuillez ne pas régler la hauteur lorsque l'utilisateur est assis.
- Veuillez ajuster la hauteur avant l'utilisation.
- En cas de pièces abîmées, cassées, usées ou manquantes, contactez le revendeur.
- Avant utilisation, veuillez vérifier que tous les éléments de fixation du produit sont bien serrés et assurez-vous qu'il n'y a pas de jeu.
- Il est recommandé d'avoir un accompagnateur lors de l'utilisation de la chaise de toilette.
- Lorsque vous ajustez la hauteur, assurez-vous que la hauteur des quatre pieds est la même et que les goupilles de positionnement sont bien serrées.

Liste des pièces :

- 1. Accoudoirs (x2) :** Accoudoirs fixes, ergonomiques, assurant un appui sécurisé lors de l'assise et du relevage.
- 2. Dossier :** Dossier anatomique avec poignée intégrée pour faciliter la manipulation et le déplacement du produit.
- 3. Assise principale :** Assise robuste avec ouverture centrale, conçue pour le confort et la stabilité de l'utilisateur.
- 4. Couvercle d'assise :** Couvercle amovible, facilitant l'utilisation en tant que chaise classique lorsque le seau n'est pas requis.
- 5. Seau hygiénique :** Seau amovible avec couvercle, positionné sous l'assise pour la collecte des déchets.
- 6. Support de seau :** Élément de maintien assurant la stabilité du seau sous l'assise.
- 7. Structure principale :** Châssis porteur reliant l'assise aux pieds, garantissant la rigidité de l'ensemble.
- 8. Tubes supérieurs des pieds (x4) :** Partie fixe de la structure des pieds, intégrée à l'assise.
- 9. Tubes inférieurs réglables (x4) :** Éléments télescopiques permettant l'ajustement de la hauteur.
- 10. Boutons de réglage (x4) :** Système de réglage par poussoir pour ajuster la hauteur des pieds.

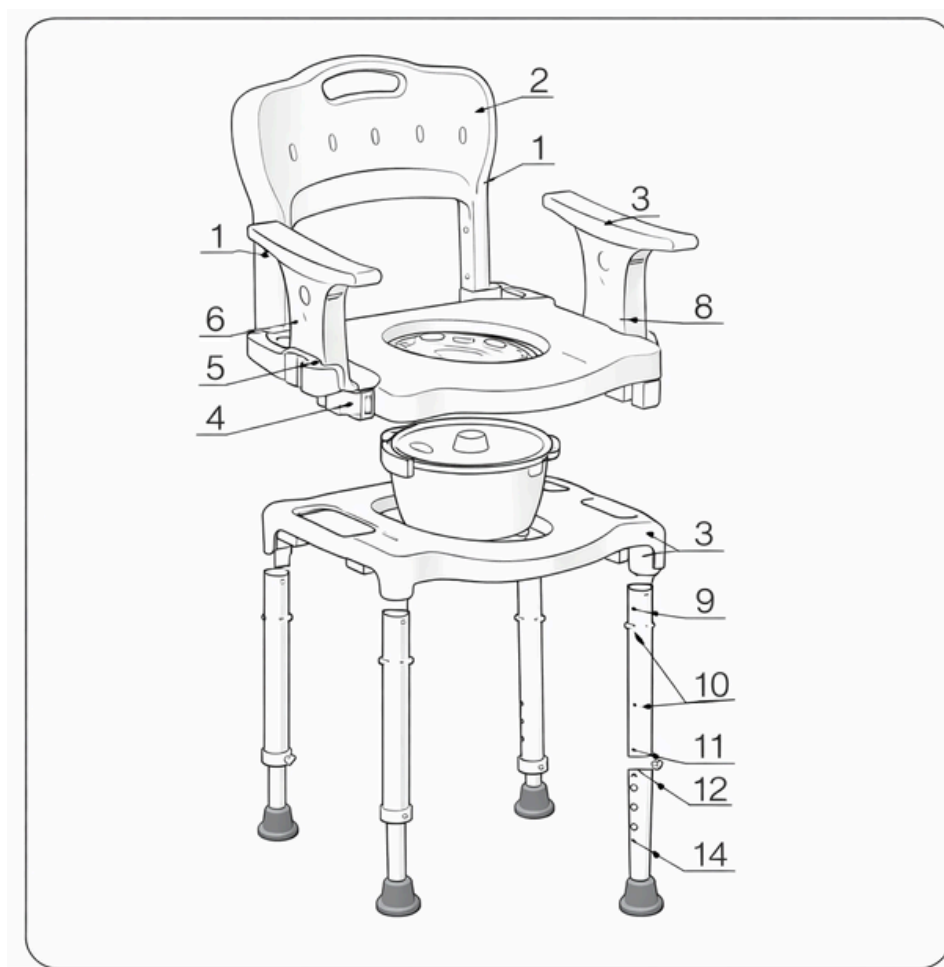

La chaise de toilette est équipée d'un dossier ergonomique, de deux accoudoirs fixes et de quatre pieds réglables en hauteur. Elle est conçue pour une utilisation stable et sécurisée en intérieur.

Réglage de la hauteur : la hauteur de la chaise est réglable afin de s'adapter à la morphologie de l'utilisateur.

Appuyez sur le bouton de réglage situé sur chaque pied.

Faites coulisser le tube télescopique inférieur vers le haut ou vers le bas jusqu'à la hauteur souhaitée.

Relâchez le bouton et vérifiez qu'il s'enclenche correctement dans le trou de réglage. Assurez-vous que les quatre pieds sont réglés à la même hauteur afin de garantir la stabilité du produit.

Installation de la chaise de toilette

1. Installation des pieds
2. Insérez les quatre tubes de pieds dans les emplacements prévus sous l'assise jusqu'à ce qu'ils soient correctement emboîtés. Vérifiez que les boutons de réglage ressortent correctement.
3. Installation du dossier et des accoudoirs
4. Le dossier et les accoudoirs sont déjà montés sur ce modèle. Vérifiez qu'ils sont bien fixés avant utilisation.
5. Installation du seau de toilette
6. Insérez le seau dans l'ouverture centrale située sous l'assise.
7. Placez ensuite le couvercle du seau afin de limiter les odeurs lorsque la fonction toilette n'est pas utilisée.
8. Utilisation en mode chaise
9. Lorsque la fonction toilette n'est pas nécessaire, le couvercle d'assise peut être maintenu en place afin d'utiliser la chaise comme une assise classique.

Utilisation de la fonction toilette

Retirez le couvercle d'assise avant utilisation.

Après usage, retirez le seau avec précaution, videz-le et nettoyez-le à l'aide d'un produit adapté.

Remplacez le seau et le couvercle après nettoyage afin d'éviter la diffusion des odeurs.

ENTRETIEN - MAINTENANCE

L'absence d'entretien et de maintenance de votre produit peut entraîner des risques de blessures graves.

- Nettoyer régulièrement le produit (toutes les roulettes, les joints, et les fixations) avec un chiffon humide et un désinfectant. Ne pas utiliser de produit abrasif, de détergent ou de produits solvants.
- Sécher avec un chiffon doux propre et sec.
- La chaise doit être révisée chaque année complètement, avec lubrification obligatoire.
- Il est recommandé d'effectuer un entretien du produit au moins une fois par an. Si le produit est soumis à une utilisation intensive et/ou à une utilisation dans un environnement multi-utilisateurs, nous recommandons de le faire réviser plus fréquemment.
- En cas de dysfonctionnement, ne pas réparer le produit soi-même. Consulter un revendeur agréé

Vérifier l'article	À tout moment	Chaque semaine	Tous les mois	Chaque année
Etat et fonctionnement accoudoirs, dossier et siège	X			
Etat et fonctionnement du seau	X			
Goupille de positionnement	X			

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions hors tout	Larg. 56 x larg. du siège 50 x haut. 42 - 57 cm
Distance entre les accoudoirs	Larg. 46 x prof. 43 x haut. 42 à 54,5 cm en 6 positions
Poids	5,5 kg
Poids maximum autorisé	130 kg

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE

Le produit peut être réutilisé. Il doit d'abord être nettoyé et désinfecté en respectant les consignes d'hygiène. Lors du transfert du produit, pensez à remettre tous les documents techniques nécessaires au nouvel utilisateur. Au préalable, le produit devra être inspecté par un spécialiste autorisé.

RECYCLAGE

Lorsque le produit sera devenu inutilisable et que vous devrez le jeter : veuillez contacter votre revendeur spécialisé. Si vous souhaitez effectuer le recyclage par vous-même, demandez à la société locale de gestion des déchets pour les directives d'élimination.

STOCKAGE

Le non-respect des conditions de stockage peut entraîner une détérioration du produit et donc des risques de blessures graves

- Ne pas stocker votre produit pendant une période prolongée près d'une source de chaleur ou au soleil (ex : derrière une fenêtre ou près d'un radiateur) ou près d'une source de froid.
- Conserver à l'écart de toute flamme et source d'étincelle.
- Respecter les conditions pour ranger et stocker votre produit.
- Dans un endroit sec et tempéré
- Protéger votre produit par un emballage de la poussière, de la corrosion (ex : éléments abrasifs, sable, eau de mer, air salin).
- Stockez toutes les pièces retirées ensemble, au même endroit (ou repérez-les si nécessaire) pour éviter de les mélanger avec d'autres produits lors du remontage.
- Tous les composants doivent être stockés sans la moindre charge (ne pas déposer d'objets trop lourds sur les éléments du produit ne rien coincer...).

DUREE D'UTILISATION

La durée de vie prévue de ce produit est de 5 ans en conditions d'utilisation, de sécurité et d'entretien normales pour un utilisateur. Au-delà de cette période, le produit peut être utilisé aussi longtemps tant qu'il est toujours en bon état. Si le produit est utilisé dans un environnement à utilisateurs multiples (maison de retraite ou hôpital), la durée de vie peut être réduite