

Manuel d'utilisation

Tabouret de douche CORAIL

Référence :

CORAIL

Classification: Dispositif Médical – Classe I

Garantie 2 ans



MISES EN GARDE

1. Inspectez l'ensemble des pièces afin de détecter tout dommage avant l'assemblage. En cas de dommage, **N'UTILISEZ PAS LE PRODUIT**. Communiquez avec le revendeur ou le transporteur pour de plus amples instructions. Livré avec clé hexagonale et clé à bout ouvert.
2. Toutes les fixations en U doivent être insérées complètement dans le trou correspondant du tube de patte ajustable. Cela permet de s'assurer que les tubes de pattes ajustables sont bien verrouillés à la même hauteur.
3. Assurez-vous que l'ensemble des vis, écrous et boulons sont serrés.
4. Assurez-vous que les embouts en caoutchouc sont en place sur les tubes de patte ajustables et qu'ils ne sont pas déchirés, usés ou manquants. Remplacez tous les embouts manquants ou endommagés.
5. Les embouts en caoutchouc des quatre tubes de patte ajustables DOIVENT absolument toucher le sol simultanément en tout temps. 6. NE montez JAMAIS sur la chaise

DIAGRAMME DES PIÈCES



ASSEMBLAGE ET UTILISATION

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER VOTRE CHAISE.

1. Placez le siège à l'envers sur une surface de travail.
2. Placez la barre transversale B dans la rainure diagonale du siège et la barre transversale A perpendiculairement au-dessus de la barre B dans l'autre rainure. **(Figure 1)**
3. À l'aide de la clé hexagonale, posez les quatre vis pour fixer le siège au cadre. **(Figure 2)**
4. Posez la vis du milieu et la rondelle dans l'orifice central du cadre et du siège. **(Figure 3)**
5. Posez la vis au milieu du cadre à l'aide de la clé hexagonale et de la clé à bout ouvert. **(Figure 4)**
6. Glissez la première patte dans le cadre, réglez la hauteur, puis insérez la fixation en C dans le trou prévu à cet effet. Répétez pour les autres pattes en les réglant à la même hauteur. **(Figure 5)**



Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4



Figure 5

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DES PATTES

1. Pour régler la hauteur des pattes, retirez la fixation en C du trou; réglez la patte à la hauteur souhaitée et remettez la fixation en U dans le trou de réglage. Un clic se fait entendre lorsque les fixations en C sont engagées.
2. Répétez pour les autres pattes en vous assurant que les pattes sont toutes à la même hauteur.
3. Poussez et tirez sur chacune des pattes pour vous assurer qu'elles sont bien verrouillées.

Avant d'utiliser la chaise, assurez-vous que les pattes sont toutes à la même hauteur.

ATTENTION : La chaise peut supporter un poids maximum de 249 kg (550 lb).

ENTRETIEN

Il est recommandé de procéder régulièrement à une inspection visuelle de la chaise de douche pour s'assurer que l'ensemble des pièces et de la quincaillerie sont bien fixées, que les composants sont en bon état de marche et ne sont ni usés, brisés, effilochés ou lâches, et que le fonctionnement normal et sécuritaire n'est en aucune manière obstrué ou entravé. Si un composant ou un mécanisme semble poser un risque ou être endommagé, n'utilisez pas le produit. En cas de problème, communiquez avec Medline en appelant le 1-800-MEDLINE.

REMARQUE : Pour préserver l'apparence et favoriser une bonne hygiène, nettoyez périodiquement avec un savon doux et rincez à l'eau tiède. Essuyez la chaise de douche après chaque utilisation.