

Manuel d'utilisation

Chaise de douche CORFOU

Référence :

CORFOU

Classification: Medical device Class I

Garantie 2 ans



IMPORTANT

Lire attentivement la notice avant toute utilisation de ce produit et la conserver en cas de besoin.

Utilisateur : si vous êtes dans l'incapacité de lire ou de comprendre les avertissements, précautions ou instructions, veuillez contacter votre professionnel de santé ou distributeur avant d'utiliser ce produit sous peine de risques et de dommages. Consulter votre médecin ou spécialiste de santé avant d'utiliser un dispositif d'aide technique. Il vous conseillera sur son utilisation la plus appropriée à votre cas. Distributeur : cette notice doit être remise aux utilisateurs de ce produit.

DESTINATION DU PRODUIT

La chaise de douche CORFOU est un dispositif médical destiné à faciliter la toilette des personnes en situation de fragilité ou à mobilité réduite.

Elle est conçue pour une utilisation exclusivement en intérieur, dans un environnement humide tel que la salle de bain, hors immersion.

⚠ La chaise CORFOU est strictement réservée à un usage en douche et ne doit en aucun cas être utilisée dans une baignoire.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Le non-respect des précautions d'emploi peut entraîner des risques de blessures graves.

- Ne pas dépasser le poids maximal autorisé : 136 kg
- Vérifier la stabilité du produit avant chaque utilisation
- S'assurer que les quatre pieds sont réglés à la même hauteur
- Vérifier que les boutons de réglage sont correctement enclenchés
- Ne pas utiliser le produit si une pièce est endommagée, cassée ou manquante
- Ne jamais se tenir debout sur la chaise
- Ne pas déplacer la chaise lorsque l'utilisateur est assis
- Utiliser uniquement sur un sol plat et antidérapant
- Attention au risque de pincement lors du réglage de la hauteur

1. PARTIES



2. DESCRIPTION

CHAISE DE DOUCHE AVEC ACCOUDOIRS RENFORCÉS

La chaise de douche CORFOU avec dossier et accoudoirs facilite l'hygiène personnelle des personnes à mobilité réduite qui conservent une certaine stabilité en position assise. Elle incorpore à l'extrémité de chacun de ses pieds des embouts qui lui donnent de l'adhérence sur les surfaces mouillées..

3. INSTALLATION ET UTILISATION



- Placez la base de la chaise à l'envers, placez les pieds en forme de croix, le pied avec le creux central en premier et le pied le plus épais au milieu en dernier, placez les fers en forme de L sur les croix des pieds, placez les vis les plus longues avec leurs rondelles dans les quatre trous visibles. 1

- Dans les quatre trous supérieurs des poteaux en fer en forme de L, placez quatre autres boulons transversaux avec leurs rondelles, il est important de ne pas serrer les boulons avant d'avoir placé les quatre boulons transversaux. 2

- Positionnez les accoudoirs, il est important qu'ils soient orientés vers l'extérieur et non vers l'intérieur, et réglez-les à la hauteur souhaitée. 3

- Tout d'abord, lisez l'étape 1 si vous avez le 9100R. Placez les deux tiges métalliques et formez une croix. 4

- Fixez les barres aux extrémités de la chaise et posez les vis et les rondelles.

- Montez les accoudoirs, il est important que le sens soit vers l'extérieur et non vers l'intérieur, placez-les à la hauteur souhaitée. 6

ENTRETIEN - MAINTENANCE

L'absence d'entretien peut entraîner des risques de blessures graves.

- Nettoyer régulièrement le produit avec de l'eau tiède et un chiffon doux
- Ne pas utiliser de produits abrasifs, détergents ou solvants
- Sécher avec un chiffon propre et sec après nettoyage
- En cas de dysfonctionnement, ne pas réparer le produit soi-même
- Consulter un revendeur ou un professionnel agréé si nécessaire

RECYCLAGE

Lorsque le produit sera devenu inutilisable et que vous devrez le jeter : veuillez contacter votre revendeur spécialisé. Si vous souhaitez effectuer le recyclage pour vous-même, demandez à la société locale de gestion des déchets pour les directives d'élimination.

STOCKAGE

Le non-respect des conditions de stockage peut entraîner une détérioration du produit et donc des risques de blessures graves

Ne pas stocker votre produit pendant une période prolongée près d'une source de chaleur ou au soleil (ex : derrière une fenêtre ou près d'un radiateur) ou près d'une source de froid.

Conserver à l'écart de toute flamme et source d'étincelle.

Respecter les conditions pour ranger et stocker votre produit.

- Dans un endroit sec et tempéré
- Protéger votre produit par un emballage de la poussière, de la corrosion (ex : éléments abrasifs, sable, eau de mer, air salin)
- Stockez toutes les pièces retirées ensemble, au même endroit (ou repérez-les si nécessaire) pour éviter de les mélanger avec d'autres produits lors du remontage.
- Tous les composants doivent être stockés sans la moindre charge (ne pas déposer d'objets trop lourds sur les éléments du produit ne rien coincer...).