

## Manuel d'utilisation

Chaise garde de robe Intime

### Référence :

Intime

Classification: Dispositif Médical – Classe I

Garantie 2 ans



## IMPORTANT

Lire attentivement la notice avant toute utilisation de ce produit et la conserver en cas de besoin. Utilisateur : si vous êtes dans l'incapacité de lire ou de comprendre les avertissements, précautions ou instructions, veuillez contacter votre professionnel de santé ou distributeur avant d'utiliser ce produit sous peine de risques et de dommages. Consulter votre médecin ou spécialiste de santé avant d'utiliser un dispositif d'aide technique. Il vous conseillera et informera sur l'utilisation la plus appropriée à votre cas. Distributeur : cette notice doit être remise aux utilisateurs de ce produit.

## DESTINATION DU PRODUIT

La chaise de toilettes Intime est un dispositif médical. C'est une aide technique à la toilette qui s'adresse aux personnes âgées, à mobilité réduite, handicapées, blessées ou qui peuvent perdre facilement l'équilibre. Il permet un positionnement confortable et une utilisation WC pour les personnes fortes.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Le non-respect des précautions d'emploi peut entraîner des risques de blessures graves.

- Ne jamais dépasser le poids maximum supporté de 120 kg.
- Assurez-vous que tous les composants sont sécurisés avant utilisation.
- Assurez-vous que le produit soit en bon état de fonctionnement.
- Contrôlez visuellement le produit
- Vérifiez la stabilité de la chaise avant utilisation.
- Utilisez uniquement sur un sol plat.
- Avant chaque utilisation, vérifier que les 4 pieds sont à la même hauteur et que les clips sont bien ressortis
- Ne vous penchez jamais lorsque vous êtes sur la chaise. Le risque de basculement augmente en cas de charge lourde unilatérale.
- Il est interdit de monter sur la chaise de toilette - risque de glissade !
- Attention au risque de pincement lors de l'utilisation.
- En cas de pièces abimées, cassées, usées ou manquantes, contactez le revendeur.
- Tous les incidents graves survenus en relation avec le produit doivent être signalés au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre où se trouve l'utilisateur et/ou le patient.



## ASSEMBLAGE & UTILISATION

- Déballez soigneusement et examinez le produit pour vous assurer qu'il est complet.
- Avant l'utilisation, vérifiez tout signe de dommages, par exemple la soudure fissurée, l'écaillé de peinture, le siège fissuré ou endommagé ou le tube plié. Si vous repérez l'un de ces problèmes, veuillez-nous contacter et vous abstenir d'utiliser le produit.

### **INSTALLATION :**

- Avant utilisation, assurez-vous que la chaise percée est stable sur une surface horizontale plane.
- Pour ajuster la hauteur de la chaise percée (811025), retirez les clips-pins et faites glisser l'extension de jambe à la hauteur désirée. Assurez-vous que toutes les jambes sont réglées à la même hauteur et remettez les clips-pins en place.
- Insérez le seau de la chaise percée. Assurez-vous que la position de la poignée du seau repose sur la barre avant de la chaise percée. Veuillez-vous assurer que le seau est placé en dessous pendant que la chaise est en position assise et tout au long de son utilisation.
- Clipper le siège de toilette sur la barre transversale arrière, en vous assurant que le siège s'enclenche en place



<b>Capacité de charge maximale (kg)</b>	<b>120 kg</b>
<b>Hauteur (cm)</b>	<b>87 cm</b>
<b>Poids (kg)</b>	<b>9 kg</b>
<b>Largeur totale (cm)</b>	<b>60 cm</b>
<b>Profondeur (cm)</b>	<b>55 cm</b>
<b>Largeur de l'assise (cm)</b>	<b>43 cm</b>
<b>Profondeur de l'assise (cm)</b>	<b>45 cm</b>
<b>Hauteur de l'assise (cm)</b>	<b>51 cm</b>
<b>Couleur</b>	<b>Bleu</b>

<b>Taille de l'ouverture du siège (cm)</b>	<b>24 x 21</b>
Cadre	Acier revêtu de poudre
Assise	Bois + Mousse + PVC
Embouts	TPE
Seau	PP



## CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE

Le produit peut être réutilisé. Il doit d'abord être nettoyé et désinfecté en respectant les consignes d'hygiène. Lors du transfert du produit, pensez à remettre tous les documents techniques nécessaires au nouvel utilisateur. Au préalable, le produit devra être inspecté par un spécialiste autorisé.

## RECYCLAGE

Le produit peut être réutilisé. Il doit d'abord être nettoyé et désinfecté en respectant les consignes d'hygiène. Lors du transfert du produit, pensez à remettre tous les documents techniques nécessaires au nouvel utilisateur. Au préalable, le produit devra être inspecté par un spécialiste autorisé.

## STOCKAGE

Le non-respect des conditions de stockage peut entraîner une détérioration du produit et donc des risques de blessures graves

- Ne pas stocker votre produit pendant une période prolongée près d'une source de chaleur ou au soleil (ex : derrière une fenêtre ou près d'un radiateur) ou près d'une source de froid.
- Conserver à l'écart de toute flamme et source d'étincelle.
- Respecter les conditions pour ranger et stocker votre produit.
- Dans un endroit sec et tempéré
- Protéger votre produit par un emballage de la poussière, de la corrosion (ex : éléments abrasifs, sable, eau de mer, air salin).
- Stockez toutes les pièces retirées ensemble, au même endroit (ou repérez-les si nécessaire) pour éviter de les mélanger avec d'autres produits lors du remontage.
- Tous les composants doivent être stockés sans la moindre charge (ne pas déposer d'objets trop lourds sur les éléments du produit ne rien coincer...).

## DUREE D'UTILISATION

La durée de vie prévue de ce produit est de 5 ans en conditions d'utilisation, de sécurité et d'entretien normales pour un utilisateur. Au-delà de cette période, le produit peut être utilisé aussi longtemps tant qu'il est toujours en bon état.