

Manuel d'utilisation

Chaise de douche LACANAU

Référence :

LACANAU

Classification: Medical device Class I

Garantie 2 ans



IMPORTANT

Lire attentivement la notice avant toute utilisation de ce produit et la conserver en cas de besoin.

Utilisateur : si vous êtes dans l'incapacité de lire ou de comprendre les avertissements, précautions ou instructions, veuillez contacter votre professionnel de santé ou distributeur avant d'utiliser ce produit sous peine de risques et de dommages. Consulter votre médecin ou spécialiste de santé avant d'utiliser un dispositif d'aide technique. Il vous conseillera sur son utilisation la plus appropriée à votre cas. Distributeur : cette notice doit être remise aux utilisateurs de ce produit.

DESTINATION DU PRODUIT

La chaise de douche LACANAU est un dispositif médical conçu pour faciliter la toilette des patients, notamment des personnes âgées, en rééducation ou à mobilité réduite. Elle est destinée à un usage en intérieur, dans un environnement humide tel que la salle de bain, hors immersion.

⚠ Son utilisation est strictement réservée à la douche et elle ne doit en aucun cas être utilisée dans une baignoire.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Le non-respect des précautions d'emploi peut entraîner des risques de blessures graves.

- Ne dépassez pas la charge maximale autorisée de 100 kg
- Assurez-vous que le produit soit en bon état de fonctionnement avant chaque utilisation
- Vérifiez que toutes les pièces soient correctement enclenchées
- Vérifiez que les quatre pieds soient réglés à la même hauteur
- Assurez-vous que les embouts ventouse antidérapants soient correctement positionnés
- Ne jamais se tenir debout sur la chaise
- Ne pas déplacer la chaise lorsque l'utilisateur est assis
- En cas de pièces abîmées, cassées, usées ou manquantes, contactez le revendeur
- Attention au risque de pincement lors du réglage de la hauteur

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions :

- Largeur totale : 540 mm
- Profondeur totale : 450 mm
- Largeur du siège : 390 mm
- Profondeur du siège : 320 mm

Autres caractéristiques :

- Poids net : 3,8 kg
- Poids maximal supporté : 100 kg
- Réglage de la hauteur : 6 niveaux
- Matériaux : imperméables avec finition effet bois

QUE CONTIENT LA BOÎTE ?

La boîte contient :

- 1 assise de chaise de douche avec dossier
- 2 accoudoirs avec revêtement en mousse
- 4 pieds réglables en hauteur
- 4 embouts ventouse antidérapants
- 1 notice d'utilisation

COMMENT MONTER ?

Le montage est simple et ne nécessite aucun outil.

1. Insérer les quatre pieds dans la structure de l'assise
2. Régler la hauteur souhaitée à l'aide du système de réglage
3. Vérifier que chaque réglage est correctement verrouillé
4. S'assurer que les embouts ventouse sont bien en contact avec le sol

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE

Le produit peut être réutilisé.

Il doit être nettoyé et désinfecté avant toute nouvelle utilisation.

Lors du transfert du produit, tous les documents techniques doivent être remis au nouvel utilisateur.

Une inspection par un spécialiste est recommandée.

RECYCLAGE

Lorsque le produit devient inutilisable, veuillez contacter votre revendeur spécialisé ou votre service local de gestion des déchets pour les modalités de recyclage.

STOCKAGE

- Stocker le produit dans un endroit sec et tempéré
- Ne pas exposer à une source de chaleur ou de froid extrême
- Protéger de la poussière, de l'humidité et de la corrosion
- Ne pas poser d'objets lourds sur le produit

DUREE D'UTILISATION

La durée de vie prévue de ce produit est de 5 ans, dans des conditions normales d'utilisation, de sécurité et d'entretien.

Au-delà de cette période, le produit peut être utilisé tant qu'il reste en bon état.

