

Manuel d'utilisation

Chaise de douche LAGON

Référence :

LAGON

Classification: Medical device Class I

Garantie 2 ans



IMPORTANT

Lire attentivement la notice avant toute utilisation de ce produit et la conserver en cas de besoin.

Utilisateur : si vous êtes dans l'incapacité de lire ou de comprendre les avertissements, précautions ou instructions, veuillez contacter votre professionnel de santé ou distributeur avant d'utiliser ce produit sous peine de risques et de dommages. Consulter votre médecin ou spécialiste de santé avant d'utiliser un dispositif d'aide technique. Il vous conseillera sur son utilisation la plus appropriée à votre cas. Distributeur : cette notice doit être remise aux utilisateurs de ce produit.

DESTINATION DU PRODUIT

Le tabouret de douche LAGON est un dispositif médical conçu pour faciliter la toilette des patients, notamment des personnes âgées ou à mobilité réduite.

Il est destiné à un usage en intérieur, dans un environnement humide tel que la salle de bain, hors immersion.

⚠ Son utilisation est strictement réservée à la douche et il ne doit en aucun cas être utilisé dans une baignoire.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Le non-respect des précautions d'emploi peut entraîner des risques de blessures graves.

- Ne dépassez pas la charge maximale autorisée de 100 kg
- Assurez-vous que le produit soit en bon état de fonctionnement avant chaque utilisation
- Vérifiez que toutes les molettes de serrage soient correctement serrées
- Vérifiez que les quatre pieds soient réglés à la même hauteur
- Assurez-vous que les embouts en caoutchouc soient correctement positionnés
- Ne jamais se tenir debout sur le tabouret
- Ne pas déplacer le tabouret lorsque l'utilisateur est assis
- En cas de pièces abîmées, cassées, usées ou manquantes, contactez le revendeur
- Attention au risque de pincement lors du réglage de la hauteur

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions :

- Hauteur hors tout réglable : 360 à 550 mm
- Largeur hors tout : 310 mm
- Diamètre de l'assise : 310 mm

Autres caractéristiques :

- Poids net : 1,3 kg
- Poids maximal supporté : 100 kg
- Réglage de la hauteur : 8 positions
- Assise : plastique médical hypoallergénique



QUE CONTIENT LA BOÎTE ?

La boîte contient :

- 1 assise de tabouret de douche
- 4 pieds réglables en hauteur
- 5 molettes de serrage
- 4 embouts en caoutchouc antidérapants
- 1 notice d'utilisation

COMMENT MONTER ?

Le montage est simple et ne nécessite aucun outil.

- Fixer l'assise sur la structure à l'aide des 5 molettes de serrage
- Insérer les quatre pieds dans la structure du tabouret
- Régler la hauteur souhaitée à l'aide du système à cliquet
- Vérifier que chaque réglage est correctement verrouillé
- S'assurer que les embouts en caoutchouc sont bien en contact avec le sol



Caractéristiques

Chaque pied est équipé d'un embout en caoutchouc antidérapant afin d'assurer la stabilité de la chaise d'aide au bain sur des sols mouillés ou humides.

Chaque pied dispose d'un bouton de verrouillage à ressort permettant de régler la hauteur de la chaise d'aide au bain.



Caractéristiques

Le dessus du siège de bain pour adultes est fabriqué en PE haute résistance, résistant aux chocs et aux fissures, et facile à nettoyer.

L'assise du siège de bain pour adultes est dotée d'une surface texturée antidérapante afin d'éviter la stagnation de l'eau et les risques de glissade.



ENTRETIEN – MAINTENANCE

L'absence d'entretien peut entraîner des risques de blessures graves.

- Nettoyer régulièrement le produit avec de l'eau tiède et un chiffon doux
- Ne pas utiliser de produits abrasifs, détergents ou solvants
- Sécher avec un chiffon propre et sec après nettoyage
- En cas de dysfonctionnement, ne pas réparer le produit soi-même
- Consulter un revendeur ou un professionnel agréé si nécessaire

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

Le produit peut être réutilisé.

Il doit être nettoyé et désinfecté avant toute nouvelle utilisation.

Lors du transfert du produit, tous les documents techniques doivent être remis au nouvel utilisateur.

Une inspection préalable par un spécialiste est recommandée.

STOCKAGE

- Stocker le produit dans un endroit sec et tempéré
- Ne pas exposer à une source de chaleur ou de froid extrême
- Protéger de la poussière, de l'humidité et de la corrosion
- Ne pas poser d'objets lourds sur le produit

RECYCLAGE

Lorsque le produit devient inutilisable, veuillez contacter votre revendeur spécialisé ou votre service local de gestion des déchets pour connaître les modalités de recyclage.

DURÉE D'UTILISATION

La durée de vie prévue de ce produit est de 5 ans, dans des conditions normales d'utilisation, de sécurité et d'entretien.

Au-delà de cette période, le produit peut être utilisé tant qu'il reste en bon état.