

Manuel d'utilisation

Chaise de douche MALIBU

Référence :

MALIBU

Classification: Medical device Class I

Garantie 2 ans



IMPORTANT

Lire attentivement la notice avant toute utilisation de ce produit et la conserver en cas de besoin.

Utilisateur : si vous êtes dans l'incapacité de lire ou de comprendre les avertissements, précautions ou instructions, veuillez contacter votre professionnel de santé ou distributeur avant d'utiliser ce produit sous peine de risques et de dommages. Consulter votre médecin ou spécialiste de santé avant d'utiliser un dispositif d'aide technique. Il vous conseillera sur son utilisation la plus appropriée à votre cas. Distributeur : cette notice doit être remise aux utilisateurs de ce produit.

DESTINATION DU PRODUIT

La chaise de douche MALIBU est un dispositif médical destiné à faciliter la toilette des personnes en situation de fragilité ou à mobilité réduite.

Elle est conçue pour une utilisation exclusivement en intérieur, dans un environnement humide tel que la salle de bain, hors immersion.

⚠ La chaise MALIBU est strictement réservée à un usage en douche et ne doit en aucun cas être utilisée dans une baignoire.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Le non-respect des précautions d'emploi peut entraîner des risques de blessures graves.

- Ne pas dépasser le poids maximal autorisé : 120 kg
- Vérifier la stabilité du produit avant chaque utilisation
- S'assurer que les quatre pieds sont réglés à la même hauteur
- Vérifier que les boutons de réglage sont correctement enclenchés
- Ne pas utiliser le produit si une pièce est endommagée, cassée ou manquante
- Ne jamais se tenir debout sur la chaise
- Ne pas déplacer la chaise lorsque l'utilisateur est assis
- Utiliser uniquement sur un sol plat et antidérapant
- Attention au risque de pincement lors du réglage de la hauteur

CONTENU DE LA BOÎTE

La boîte contient :

1. Assise de douche
2. Accoudoirs (x2)
3. Dossier ergonomique
4. Poignées / revêtements d'accoudoirs
5. Pieds réglables en hauteur (x4)
6. Boutons de réglage de hauteur
7. Embouts antidérapants (viroles en caoutchouc)
8. Traverses / éléments de liaison de la structure



Montage de la chaise

- 1 Placez le siège sur une surface plane et montez les supports de pieds à travers le siège, en les fixant en position à l'aide du boulon à molette 7 (taille moyenne) situé au centre du siège.



- 2** Fixez les supports de dossier **3** en place sur les supports de pieds, puis vissez-les dans les 4 coins (en traversant les deux tubes) à l'aide des boulons à molette **7** (grande taille).

REMARQUE : Ceci s'applique uniquement à la chaise de douche. Pour les tabourets de douche, vissez les boulons à molette dans les mêmes 4 coins, sans traverser les tubes du dossier.



- 3** Fixez les tubes d'extension des pieds sur les supports de pieds.

REMARQUE : Un tube d'extension de pied comporte des trous supplémentaires pour s'adapter aux surfaces irrégulières. Veuillez vous assurer que les 4 pieds sont réglés à la même hauteur avant utilisation.



- 4 Fixez les accoudoirs dans les logements situés de chaque côté du châssis, en vous assurant que les 4 goupilles de verrouillage (2 de chaque côté) sont correctement verrouillées en place.



- 5 Fixez le dossier aux supports de dossier, puis serrez-le en place à l'aide de 4 boulons à molette (petite taille).

REMARQUE : Cette opération s'applique uniquement à la chaise de douche, et non au tabouret de douche.



- 6** Vérifiez et assurez-vous que tous les boulons à molette (petite et grande taille) sont correctement serrés, que les goupilles des accoudoirs sont bien engagées et verrouillées, et que les 4 pieds sont réglés à la même hauteur. Votre chaise ou tabouret de douche MALIBU est désormais prêt à l'utilisation.



Chaise de douche



Tabouret de douche

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DES PIEDS



Avant utilisation, réglez la hauteur de chaque pied selon vos besoins spécifiques, en veillant à ce que tous les pieds soient à la même hauteur. Une fois la hauteur souhaitée atteinte, verrouillez les pieds en place en alignant les boutons de verrouillage avec les trous appropriés, conformément à l'illustration.

ENTRETIEN - MAINTENANCE

L'absence d'entretien et de maintenance de votre rollator peut entraîner des risques de blessures graves.

- Nettoyer régulièrement le produit avec de l'eau tiède et un chiffon doux. Ne pas utiliser de produit abrasif, de détergent ou de produits solvants.
- Sécher avec un chiffon doux propre et sec.
- En cas de dysfonctionnement, ne pas réparer le produit soi-même. Consulter un revendeur agréé.

RECYCLAGE

Lorsque le produit sera devenu inutilisable et que vous devrez le jeter : veuillez contacter votre revendeur spécialisé. Si vous souhaitez effectuer le recyclage pour vous-même, demandez à la société locale de gestion des déchets pour les directives d'élimination.

STOCKAGE

Le non-respect des conditions de stockage peut entraîner une détérioration du produit et donc des risques de blessures graves

Ne pas stocker votre produit pendant une période prolongée près d'une source de chaleur ou au soleil (ex : derrière une fenêtre ou près d'un radiateur) ou près d'une source de froid.

Conserver à l'écart de toute flamme et source d'étincelle.

Respecter les conditions pour ranger et stocker votre produit.

- Dans un endroit sec et tempéré
- Protéger votre produit par un emballage de la poussière, de la corrosion (ex : éléments abrasifs, sable, eau de mer, air salin)
- Stockez toutes les pièces retirées ensemble, au même endroit (ou repérez-les si nécessaire) pour éviter de les mélanger avec d'autres produits lors du remontage.
- Tous les composants doivent être stockés sans la moindre charge (ne pas déposer d'objets trop lourds sur les éléments du produit ne rien coincer...).

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE

Le produit peut être réutilisé. Il doit d'abord être nettoyé et désinfecté en respectant les consignes d'hygiène. Lors du transfert du produit, pensez à remettre tous les documents techniques nécessaires au nouvel utilisateur. Au préalable, le produit devra être inspecté par un spécialiste autorisé.

DUREE D'UTILISATION

La durée de vie prévue de ce produit est de 5 ans en conditions d'utilisation, de sécurité et d'entretien normales. Au-delà de cette période, le produit peut être utilisé aussi longtemps tant qu'il est toujours en bon état.