

## Manuel d'utilisation

Cadre de marche Marcheo

### Référence :

Marcheo

Classification: Dispositif Médical – Classe I

Garantie 2 ans



## IMPORTANT

Lire attentivement la notice avant toute utilisation de ce produit et la conserver en cas de besoin. Utilisateur : si vous êtes dans l'incapacité de lire ou de comprendre les avertissements, précautions ou instructions, veuillez contacter votre professionnel de santé ou distributeur avant d'utiliser ce produit sous peine de risques et de dommages. Consulter votre médecin ou spécialiste de santé avant d'utiliser un dispositif d'aide technique. Il vous conseillera et informera sur l'utilisation la plus appropriée à votre cas. Distributeur : cette notice doit être remise aux utilisateurs de ce produit.

## DESTINATION DU PRODUIT

Les cadres de marche releveurs pliants et cadres de marche articulés sont des dispositifs d'aide à la marche destinés aux personnes à mobilité réduite. Ces cadres de marche sont destinés à l'intérieur et à l'extérieur. Les cadres de marche releveurs pliants se replient pour faciliter le rangement ou le transport.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Le non-respect des précautions d'emploi peut entraîner des risques de blessures graves.


- Ne dépassez pas la limite maximale de poids de 120 Kg.
- N'utilisez pas le cadre de marche dans un escalier ou sur un escalator.
- Utilisez uniquement les accessoires et les pièces fournies par le fabricant.
- Assurez-vous que les boutons-pression soient placés dans le même trou de réglage lorsque vous réglez la hauteur du cadre de marche.
- Les personnes gravement handicapées ou les personnes incapables de marcher sans aide ne doivent pas essayer d'utiliser ce produit sans assistance.
- Le cadre de marche est une aide à la marche. Ce n'est pas un fauteuil roulant. Il n'a pas été conçu pour transporter une personne assise dessus. Un tel usage risque d'endommager les pieds et la structure même du cadre de marche. Celui-ci pourrait en être fragilisé et ne plus répondre à ses caractéristiques mécaniques lors des futurs usages. N'utilisez le cadre de marche que comme support de marche.
- N'utilisez pas le cadre de marche pour marcher en arrière.
- Assurez-vous que toutes les pièces soient bien fixées et en bon état de fonctionnement.
- N'effectuez aucun réglage sur le cadre de marche pendant qu'il est en cours d'utilisation.
- Le cadre de marche doit toujours être en contact avec le sol.

## DESCRIPTION DU PRODUIT



## ASSEMBLAGE

### 1. Mise en place du cadre de marche

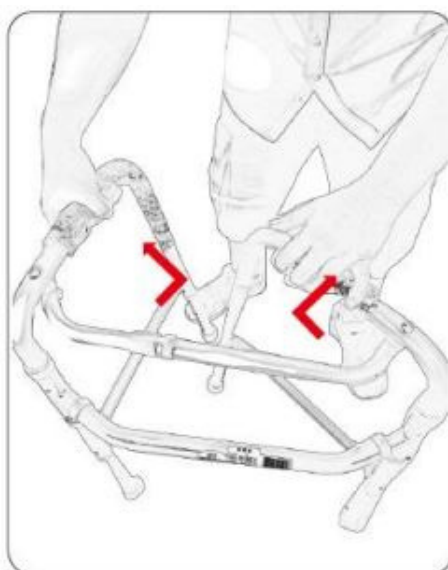


- Sortez le cadre de marche du carton
- Faites pivoter les deux cadres latéraux pour les éloigner de la traverse avant jusqu'à ce qu'un "clic" se fasse entendre

## 2. Pliage du cadre de marche



- Trouvez le morceau de plastique en haut de la barre avant.
- Appuyez sur le mécanisme de verrouillage et repliez les cadres latéraux vers l'avant de la traverse avant

## 3. Réglage des extensions des tubes

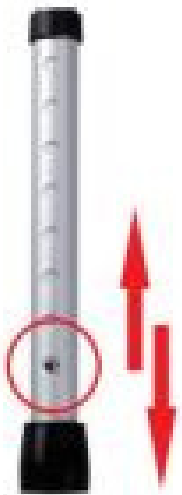

- Appuyez sur le bouton-pression, étendez ou rétractez le tube du cadre de marche pour augmenter ou diminuer la hauteur.
- Ajustez l'extension du tube à la hauteur souhaitée et laissez le bouton-pression s'enclencher dans le trou de réglage de la hauteur. (Un "clic" audible se fait entendre).
- Assurez-vous que le cadre de marche soit droit.

**ATTENTION** Le cadre de marche **DOIT** être à niveau avant d'être utilisé. Des points de pincement existent lors de l'installation et du réglage des extensions des tubes. Assurez-vous de bien dégager les mains et le corps de tous les points de pincement

#### 4. Réglage du mouvement: fixe ou articulé (pour la référence 826084)

- Position fixe: les goupilles de réglage sont fixées sur les tubes latéraux
- Position articulée: les goupilles de réglage sont fixées sur la barre transversale

**ETAPE 1 :** Identifiez les deux goupilles situées au niveau de la barre transversale



**ETAPE 2 :** Tirez doucement sur la goupille avec vos doigts pour la retirer complètement



**ETAPE 3 :** Insérez les goupilles dans les trous alignés des montants latéraux afin de bloquer le mode articulé du cadre de marche.



**ETAPE 4 :** Vérifiez que les goupilles sont bien enclenchées et que le mécanisme est solidement fixé avant toute utilisation.



L'absence d'entretien et de maintenance de votre produit peut entraîner des risques de blessures graves.

- Nettoyer régulièrement le produit avec de l'eau tiède et un chiffon doux. Ne pas utiliser de produit abrasif, de détergent ou de produits solvants.
- Sécher avec un chiffon doux propre et sec pour éviter l'oxydation.
- S'assurer qu'il n'y ait pas d'accumulation de saleté ou de débris autour des embouts.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage contenant du phénol ou du chlore, car cela pourrait endommager les matériaux en aluminium et en polyamide.
- Contrôlez périodiquement l'usure et la solidité de toutes les vis, écrous et tout autre composant.
- En cas de dysfonctionnement, ne pas réparer le produit soi-même. Consulter un revendeur agréé.
- Liste de contrôle :
- Afin de maintenir le produit en bon état, vérifiez avant chaque utilisation, et vérifiez régulièrement comme suit :

Vérifier l'article	À tout moment	Chaque semaine
Contrôle de la goupille en position sécurisée lors du pliage	X	
Contrôle de l'état des pieds et des poignées		X



## CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE

Le produit peut être réutilisé. Il doit d'abord être nettoyé et désinfecté en respectant les consignes d'hygiène. Lors du transfert du produit, pensez à remettre tous les documents techniques nécessaires au nouvel utilisateur. Au préalable, le produit devra être inspecté par un spécialiste autorisé.

## RECYCLAGE

Lorsque le produit sera devenu inutilisable et que vous devrez le jeter : veuillez contacter votre revendeur spécialisé. Si vous souhaitez effectuer le recyclage par vous-même, demandez à la société locale de gestion des déchets pour les directives d'élimination.

## STOCKAGE

Le non-respect des conditions de stockage peut entraîner une détérioration du produit et donc des risques de blessures graves

- Ne pas stocker votre produit pendant une période prolongée près d'une source de chaleur ou au soleil (ex : derrière une fenêtre ou près d'un radiateur) ou près d'une source de froid.
- Conserver à l'écart de toute flamme et source d'étincelle.
- Respecter les conditions pour ranger et stocker votre produit.
- Dans un endroit sec et tempéré
- Protéger votre produit par un emballage de la poussière, de la corrosion (ex : éléments abrasifs, sable, eau de mer, air salin).
- Stockez toutes les pièces retirées ensemble, au même endroit (ou repérez-les si nécessaire) pour éviter de les mélanger avec d'autres produits lors du remontage.
- Tous les composants doivent être stockés sans la moindre charge (ne pas déposer d'objets trop lourds sur les éléments du produit ne rien coincer...).

## DUREE D'UTILISATION

La durée de vie prévue de ce produit est de 5 ans en conditions d'utilisation, de sécurité et d'entretien normales pour un utilisateur. Au-delà de cette période, le produit peut être utilisé aussi longtemps tant qu'il est toujours en bon état. Si le produit est utilisé dans un environnement à utilisateurs multiples (maison de retraite ou hôpital), la durée de vie peut être réduite.