

Manuel d'utilisation Fauteuil Releveur Miami

Référence :

MIAMI

Classification: Dispositif Médical – Classe I

Garantie 2 ans



IMPORTANT

⚠ Lire attentivement ce manuel avant la première utilisation.

- Vérifier que la tension électrique correspond à celle du réseau.
- Installer le fauteuil sur une surface plane et stable.
- S'assurer qu'aucun objet n'entrave les mouvements du fauteuil.
- Ne pas utiliser le produit si un câble ou le moteur est endommagé.

DESTINATION DU PRODUIT

Le fauteuil releveur MIAMI est destiné à :

- Aider l'utilisateur à s'asseoir et se relever sans effort
- Offrir une position confortable de repos et de relaxation
- Réduire les risques de chute lors du lever ou de l'assise

Il s'adresse principalement :

- Aux personnes âgées
- Aux personnes à mobilité réduite
- Aux personnes en phase de rééducation ou de convalescence

⚠ Le fauteuil n'est pas un dispositif de levage médical et ne remplace pas l'assistance humaine lorsque celle-ci est nécessaire.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Sécurité de l'utilisateur

- Ne pas dépasser la charge maximale autorisée.
- Ne pas utiliser par un enfant sans surveillance.
- Ne pas se tenir debout sur le repose-pieds.
- Ne pas s'asseoir sur les accoudoirs.

Utilisation électrique

- Ne pas tirer sur le câble pour débrancher.
- Ne pas exposer le fauteuil à l'humidité.
- Débrancher en cas d'orage ou d'anomalie.

Utilisation générale

- Ne pas modifier la structure ou le moteur.
- Utiliser uniquement les accessoires d'origine.

Introduction

Le fauteuil releveur électrique MIAMI est conçu pour faciliter l'assise, le repos et le passage en position debout des personnes à mobilité réduite, âgées ou en convalescence.

Grâce à son mécanisme électrique de relevage et d'inclinaison, il offre un confort optimal tout en améliorant l'autonomie et la sécurité de l'utilisateur.

Le fauteuil MIAMI est destiné à un usage :

- Domestique
- Collectif (EHPAD, résidences seniors, établissements de soins non intensifs)

Contenu de la boîte

Le colis contient :

- 1 fauteuil releveur électrique MIAMI (assemblé ou semi-assemblé selon version)
- 1 moteur électrique intégré
- 1 télécommande filaire
- 1 câble d'alimentation secteur
- 1 manuel d'utilisation
- Vérifier l'intégrité du produit et des câbles avant utilisation.



4. Mise en place et utilisation

4.1 Installation du fauteuil

- Déballer le fauteuil avec précaution.
- Positionner le fauteuil sur un sol plat.
- Laisser un espace suffisant à l'arrière et à l'avant pour les mouvements d'inclinaison.
- Brancher le câble d'alimentation sur une prise électrique conforme.

4.2 Fonctionnement de la télécommande

Le fauteuil MIAMI est équipé d'un moteur unique commandant l'ensemble des mouvements :

- Bouton montée : mise en position releveur (aide au lever)
- Bouton descente : position assise
- Position intermédiaire : position de repos / relaxation
- Maintenir le bouton appuyé pour effectuer le mouvement souhaité.

4.3 Utilisation quotidienne

- S'asseoir correctement au fond du siège avant toute manœuvre.
- Utiliser les accoudoirs comme appui lors du lever.
- Ne jamais se lever lorsque le fauteuil est en mouvement.
- Débrancher le fauteuil en cas de non-utilisation prolongée.

Entretien et maintenance

5.1 Entretien courant

- Nettoyer le revêtement avec un chiffon doux et légèrement humide.
- Utiliser un produit adapté aux tissus d'ameublement.
- Aspirer régulièrement pour éviter l'accumulation de poussière.

✗ Ne pas détremper

✗ Ne pas utiliser de solvants

5.2 Maintenance

- Vérifier périodiquement l'état des câbles et de la télécommande.
- En cas de bruit anormal ou de dysfonctionnement, arrêter l'utilisation.
- Toute intervention technique doit être réalisée par un professionnel agréé.



2 EN 1 : ÉLÉVATEUR ET INCLINABLE

Le fauteuil releveur peut **être incliné vers l'arrière** pour une plus grande détente.

Il peut **être incliné vers l'avant**, ce qui aide l'utilisateur à se lever du canapé sans trop d'effort.



CONFORT

Le fauteuil inclinable comporte **trois modules dans le dossier et deux modules dans l'assise**.

Il dispose également d'une **poche latérale extra-large** pour le rangement et d'une poche frontale pour le rangement de petits objets tels que la télécommande.



CONCEPTION ESTHÉTIQUE ET ROBUSTE

Ce fauteuil en tissu est **composé de lin et de polyester** et offre un design esthétique. De plus, sa robustesse lui permet de supporter jusqu'à **130 kg**.



INCLINER LE FAUTEUIL

Vous pouvez incliner le fauteuil électrique vers l'arrière en appuyant sur le bouton, de sorte que **le dossier s'incline et que les repose-pieds se relèvent** pour une plus grande détente.

7. Changement de propriétaire

En cas de revente ou de cession :

- Nettoyer intégralement le fauteuil.
- Vérifier le bon fonctionnement du moteur et de la télécommande.
- Remettre ce manuel au nouveau propriétaire.

8. Recyclage et fin de vie

- Le fauteuil contient des composants électriques et mécaniques.
- Ne pas jeter avec les déchets ménagers.
- Déposer le produit dans une filière de recyclage agréée (DEEE).
- Respecter la réglementation locale en vigueur.

9. Stockage

- Stocker dans un endroit sec et ventilé.
- Éviter l'exposition directe au soleil.
- Débrancher le fauteuil avant stockage.
- Ne pas poser d'objets lourds sur le fauteuil.

10. Durée d'utilisation

La durée de vie moyenne du fauteuil releveur OSLO est estimée à 5 à 7 ans, sous réserve :

- D'une utilisation conforme
- D'un entretien régulier
- D'un environnement adapté
- Tout signe de dégradation structurelle ou électrique nécessite l'arrêt immédiat de l'utilisation.