

OLENA
Table d'examen
multifonction électrique

Veuillez lire attentivement le manuel
d'utilisation avant d'utiliser les produits.
Plus Santé se réserve le droit d'améliorer
la conception et de modifier les produits
sans préavis.

1. A propos


Ce manuel ne doit être utilisé que pour la référence du fonctionnement de ce modèle particulier. Si le manuel est utilisé à d'autres fins, nous n'assumerons aucune conséquence ni responsabilité. Toutes les informations de ce manuel doivent être protégées par le droit d'auteur et ne doivent pas être copiées ou traduites dans aucune partie de cette spécification sans notre consentement écrit.

2. Avertissements

- L'alimentation électrique doit être coupée lors du changement de composants électriques ou lors de l'entretien et du nettoyage des machines.
- La fiche doit être branchée sur une prise correctement installée et mise à terre, afin d'éviter tout risque d'incendie et de choc électrique.
- Ne montez pas sur cet équipement.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'équipement et placez-le à un endroit difficile d'accès. Veuillez régler le dossier à la position la plus haute avant de partir.
- Veuillez ne pas placer l'équipement dans des endroits humides tels qu'une salle de bain pour éviter tout choc électrique ou autre panne ; gardez également les contrôleurs loin de l'eau.
- Veuillez ne pas placer ni utiliser l'équipement dans des endroits où des travaux de peinture/revêtement sont effectués et où de l'oxygène est fourni.
- Sauf surveillance ou instruction d'un personnel pouvant être responsable de leur sécurité personnelle, les personnes présentant des obstacles physiques, des troubles tactiles, des troubles mentaux, un manque d'expérience, un bon sens des enfants, ne sont pas autorisées à utiliser l'équipement.
- Veuillez nous contacter ou contacter une personne disposant des compétences et de l'expérience appropriées pour réparer si la fiche est endommagée, en cas de danger.
- Assurez-vous qu'aucun objet n'est accessible dans le champ de vision pendant toute opération sur les lits.
- L'opération doit être effectuée par des professionnels formés.

3. Précautions

- Ce produit doit être utilisé par une personne expérimentée qui doit être familière avec la structure du produit.
 - Lisez attentivement ce manuel avant l'installation, l'utilisation et le réglage. Et veuillez le conserver soigneusement.
 - Ce produit ne doit pas être utilisé pour des travaux de chargement sur un seul côté ou sur un seul point.
 - Respecter les règles de sécurité de fonctionnement, le produit ne doit pas être surchargé et garantir que l'équipement de protection de sécurité du produit est complet et fiable, éliminer les facteurs dangereux à temps.
 - Serrez régulièrement les boulons et les écrous pour éviter les défaillances causées par le desserrage, le glissement, les vibrations et les chutes.
 - Pendant l'entretien, l'opérateur ne doit démonter aucune pièce du lit à volonté.
 - Ce produit ne doit pas être utilisé s'il présente un défaut. Si un phénomène anormal ou un bruit anormal est détecté, il doit être immédiatement arrêté pour inspection et le travail peut être repris après le dépannage.
 - L'opérateur doit connaître les précautions décrites dans chaque section du manuel pour assurer la sécurité de la personne et du produit.
 - Ce produit est équipé d'un cordon d'alimentation à trois fils. Le cordon d'alimentation doit être branché sur une prise à trois fils. Prise correctement installée et reliée à la terre. Ceci permet non seulement d'éviter tout risque de décharge électrique, mais également de garantir le bon fonctionnement du produit.
 - Veuillez utiliser le produit en respectant strictement l'étiquette d'avertissement apposée dessus.
 - Lors du contrôle du levage, le bouton doit être appuyé en continu jusqu'à ce que le produit soit dans une position appropriée.
 - Veuillez noter que les temps de travail continu doivent être au maximum de 2 minutes ON et 18 minutes OFF, lorsque le moteur est en marche.
 - L'entretien doit être effectué par des professionnels qualifiés.
 - Après chaque utilisation, veuillez utiliser uniquement une solution neutre pour éliminer la poussière ou les taches sur le produit.
 - Lors du réglage de chaque pièce, veuillez garder vos mains, vos pieds et votre tête éloignés de la position indiquée par la flèche.
- (Comme indiqué sur la photo)

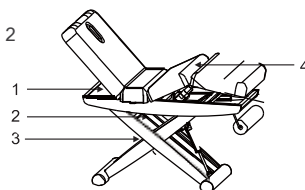


4. Installation

1. Placez le produit dans un endroit approprié, en fonction de la disposition générale, de la lumière naturelle ou artificielle et des conditions de fonctionnement du salon ou du centre. Et conservez-le dans un environnement propre, sec et frais.
2. Ouvrez le carton d'emballage pour vérifier si le produit est intact et si les accessoires ou les pièces de rechange sont complets. Veuillez contacter le distributeur ou nous contacter en cas de problème.

3. Installation

Placez le produit dans la bonne position. Veuillez noter qu'il n'est pas nécessaire d'installer un vis supplémentaire sur le sol pour fixer le lit, car la conception originale a pris en compte la stabilité. Mais assurez-vous que le produit est placé sur un sol ferme et plat, afin d'éviter tout accident. Si le produit tourne ou s'incline en raison d'un sol accidenté, veuillez ajuster les quatre pieds en plastique (M10 × 30) et les écrous (M10) à l'aide d'une clé à fourche hexagonale, qui sont fixés sur le panneau inférieur, afin de garantir que le produit est stable.


4. Branchez correctement la fiche du produit à l'alimentation électrique. (Comme indiqué sur la photo)

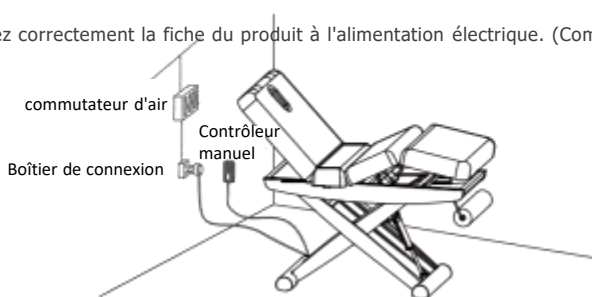

5. Structure des produits

. Ce produit se compose d'un boîtier de commande, d'un moteur, d'une pièce en bois, de quincaillerie, de pièces en plastique et de cuir. Parmi eux, le boîtier de commande contrôle le fonctionnement des moteurs et de la télécommande.

. Ce produit comprend le réglage de l'angle du dossier, le réglage de l'angle du coussin d'assise et le réglage de la hauteur qui constituent une structure globale et intégrale. (Comme indiqué sur la photo)

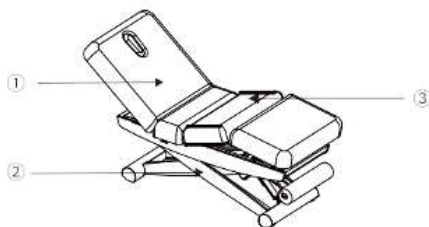


- ① Réglage de l'angle du dossier
- ② Réglage de la hauteur
- ③ Réglage de l'angle du repose-jambes

- Ce graphique est uniquement un schéma représentatif de la structure du produit, veuillez vous référer au produit réel.

6. Mode d'emploi

1. Configuration standard (contrôleur manuel)

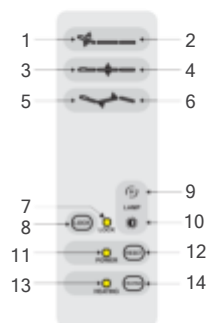

No.	Description	Opération
1	Le dossier monte	Le dossier monte en douceur en appuyant sur le bouton.
2	Le dossier descend	Le dossier descend en douceur en appuyant sur le bouton.
3	Monte	La table entière monte en douceur en appuyant sur le bouton
4	Descend	Table entière descend en douceur en appuyant sur le bouton
5	Le repose-pieds monte	Appuyez sur le bouton, le repose-pieds montera, son angle sera réduit au minimum.
6	Le repose-pied descend	Appuyez sur le bouton, le repose-pieds descendra, son angle sera déplacé au maximum.
7	Voyant du bouton de verrouillage	Continuez à appuyer sur le « bouton de verrouillage » pendant environ 2s, en allumant le voyant vert, tous les boutons ne peuvent pas être utilisés à l'exception du bouton de verrouillage. Continuez à appuyer à nouveau sur le bouton de verrouillage pendant environ 2s, le voyant vert s'éteint, tous les boutons reviennent à l'état de fonctionnement normal.
8	Bouton de verrouillage	
9	 Commutateur de mode pour lumière LED	1. Appuyez sur  pour allumer la lumière LED. 2. Appuyez long sur  pendant 2s pour éteindre la lumière LED. 3. Appuyez court sur  pour changer le mode d'éclairage LED (total 6 couleurs et total 14 modes) en séquence. La lumière LED s'éteindra après 14 modes de commutation. (Remarque : lors de la mise hors tension et du redémarrage, la lumière LED sera maintenue comme le mode précédent.)
10	 Contrôle de la luminosité pour la lumière LED	Total 12 niveaux de luminosité. Appuyez brièvement une fois pour régler la vitesse, une pression longue peut ajuster la vitesse en continu ; La luminosité passe de petite à grande, ou de grande à petite, changement de cycle, luminosité au maximum ou au minimum, lumière clignotante deux fois, puis changement de direction inverse.
11	Indicateur d'alimentation	La télécommande est correctement connectée à l'alimentation électrique, le voyant est allumé. Sinon, la lumière devrait être éteinte.


12	Bouton de réinitialisation à une touche	Appuyez sur le bouton, l'angle du dossier se déplacera automatiquement au maximum, l'angle du siège se réduira automatiquement au minimum, l'angle du repose-pieds se déplacera automatiquement au maximum, la hauteur du produit atteindra automatiquement la position la plus basse.
13	Voyant de fonction de chauffage	En appuyant sur le bouton, la lumière est allumée, la fonction chauffage fonctionne ; en appuyant à nouveau sur le bouton, la lumière est éteinte, la fonction de chauffage cesse de fonctionner.
14	Bouton de chauffage	

Notes:

Différentes commandes manuelles doivent être choisies en fonction de différentes configurations.

7. Paramètres techniques

Power	AC 100-120V ou AC 220-240V , 50/60Hz
Puissance maximale	300W
Température de l'environnement	0°C~+40°C
Humidité relative	30%~90%
Charge maximale	175kg
Dimensions emballage	202×79×67cm

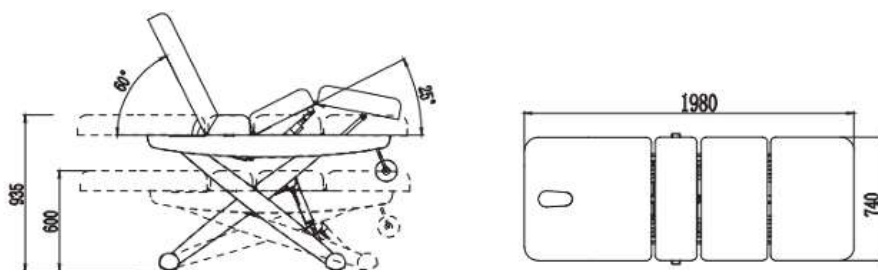


- Ce graphique est uniquement un schéma représentatif de la structure du produit, veuillez vous référer au produit réel.

8. Maintenance

1. Après chaque traitement, veuillez utiliser uniquement une solution neutre pour éliminer la poussière, les taches sur le cuir, les pièces métalliques ou autres. Les solutions désinfectantes comme l'alcool, les solutions acides ou alcalines sont interdites. Ceci afin d'éviter que la durée de vie des composants ne soit raccourcie.
2. Veuillez lubrifier régulièrement les pièces mobiles (une fois par an)
3. Après utilisation, veuillez laisser le rembourrage à plat à 180° pour éviter les plis et le froissement.

9. Schéma de circuit

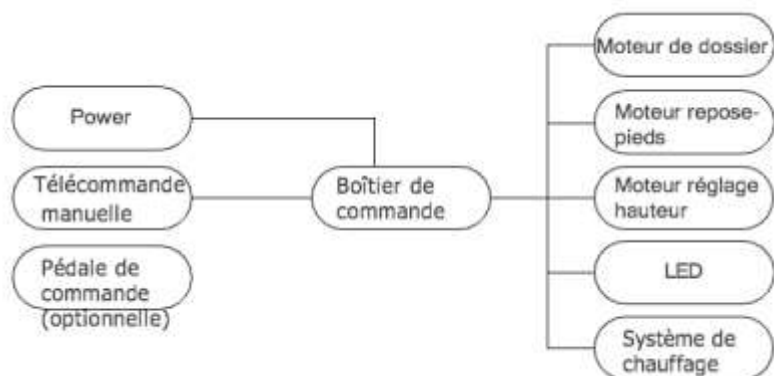

10. Dépannage

Erreur	Raison	Solution
Le moteur ne peut pas fonctionner normalement	1. Le cordon d'alimentation n'est pas connecté ou n'est pas bien branché.	1. Connectez le cordon d'alimentation ou branchez-le bien.
	2. Mauvaise qualité de la télécommande ou de la pédale.	2. Remplacez la télécommande ou la pédale.
	3. Mauvaise qualité du boîtier de commande.	3. Veuillez contacter le centre de maintenance ou le fournisseur pour le dépannage.
	4. Rupture de la queue du moteur.	
	5. Le moteur a été endommagé.	
Son anormal	1. Erreur de connexion entrée/sortie.	1. Vérifiez à nouveau la connexion de l'entrée/sortie.
	2. Erreur du boîtier de commande VTS.	2. Remplacez les pièces défectueuses.
	3. Mauvaise qualité du haut-parleur audio.	3. Si le problème n'est toujours pas résolu, veuillez contacter le centre de maintenance ou le fournisseur pour le dépannage.
Erreur VTS	1. Les pièces rotatives manquent d'huile lubrifiante.	1. Ajouter de l'huile lubrifiante.
	2. Les positions de rotation (telles que charnières, ensembles POM, vérin à gaz) manquent d'huile lubrifiante.	2. Ajouter de l'huile lubrifiante.
	3. Problèmes de qualité du moteur.	3. Remplacez le moteur.

Si le problème n'est toujours pas résolu après les opérations ci-dessus, veuillez nous contacter ou contacter un professionnel pour le résoudre.



Ne jetez pas les appareils usagés ou défectueux avec les ordures ménagères ; cette opération doit être effectuée uniquement dans les points de collecte publics.

▲ Veuillez vérifier les spécifications du produit avant utilisation. Ce manuel est fourni à titre de référence uniquement. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.