

## Manuel d'utilisation

Chaise garde de robe Quietude

## Référence :

QUIETUDE

Classification: Dispositif Médical – Classe I

Garantie 2 ans



## IMPORTANT

Lire attentivement la notice avant toute utilisation de ce produit et la conserver en cas de besoin. Utilisateur : si vous êtes dans l'incapacité de lire ou de comprendre les avertissements, précautions ou instructions, veuillez contacter votre professionnel de santé ou distributeur avant d'utiliser ce produit sous peine de risques et de dommages. Consulter votre médecin ou spécialiste de santé avant d'utiliser un dispositif d'aide technique. Il vous conseillera et informera sur l'utilisation la plus appropriée à votre cas. Distributeur : cette notice doit être remise aux utilisateurs de ce produit.

## DESTINATION DU PRODUIT

La chaise de toilette QUIETUDE est un dispositif médical. C'est une aide technique à la toilette qui s'adresse aux personnes âgées, à mobilité réduite, handicapées, blessées ou qui peuvent perdre facilement l'équilibre.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Le non-respect des précautions d'emploi peut entraîner des risques de blessures graves.

- Ne jamais dépasser le poids maximum supporté de 130 kg.
- Assurez-vous que tous les composants sont sécurisés avant utilisation.
- Assurez-vous que le produit soit en bon état de fonctionnement.
- L'appareil ne convient pas aux utilisateurs qui ne peuvent pas s'asseoir et se tenir debout normalement.
- Contrôlez visuellement le produit.
- Vérifiez la stabilité de la chaise avant utilisation.
- Utilisez uniquement sur un sol plat.
- Ne vous penchez jamais lorsque vous êtes sur la chaise.
- Veuillez ne pas régler la hauteur lorsque l'utilisateur est assis.
- Veuillez ajuster la hauteur avant l'utilisation.
- En cas de pièces abimées, cassées, usées ou manquantes, contactez le revendeur.
- Avant utilisation, veuillez vérifier que tous les éléments de fixation du produit sont bien serrés et assurez-vous qu'il n'y a pas de jeu.
- Il est recommandé d'avoir un accompagnateur lors de l'utilisation de la chaise de toilette.
- Lorsque vous ajustez la hauteur, assurez-vous que la hauteur des quatre pieds est la même et que les goupilles de positionnement sont bien serrées.



Cette image présente la chaise garde-robe entièrement déployée et prête à l'emploi.

La structure est constituée d'un châssis métallique stable avec quatre pieds antidérapants assurant une bonne sécurité lors de l'utilisation.

**La chaise est équipée :**

- d'un siège avec ouverture centrale,
- d'un dossier pour le maintien du dos,
- de deux accoudoirs latéraux facilitant l'assise et le relevage de l'utilisateur.

Un seau hygiénique amovible est positionné sous l

la chaise garde-robe en position pliée, facilitant son rangement et son transport.

Le châssis est replié de manière compacte, réduisant l'encombrement lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Le seau hygiénique avec couvercle est présenté séparément, illustrant son caractère amovible pour un vidage et un nettoyage aisés.





la chaise garde-robe en position d'utilisation, avec le seau hygiénique retiré et placé au sol devant la chaise.

Le siège est équipé d'une lunette relevable avec couvercle, permettant l'accès à l'ouverture centrale.

La structure métallique robuste repose sur quatre pieds antidérapants assurant une bonne stabilité.

Les accoudoirs latéraux et le dossier offrent un soutien supplémentaire à l'utilisateur.

Le seau amovible, muni d'un couvercle et d'une anse de transport, est conçu pour être facilement retiré pour la vidange et le nettoyage.

la chaise garde-robe avec le seau hygiénique correctement positionné sous l'assise.

La lunette et le couvercle sont relevés, montrant la configuration prête à l'emploi.

L'ensemble met en évidence l'intégration du seau dans la structure, garantissant une utilisation sécurisée et hygiénique.

La conception ergonomique de la chaise permet une utilisation confortable, tout en facilitant l'accès et la maintenance du seau.



## ENTRETIEN - MAINTENANCE

L'absence d'entretien et de maintenance de votre produit peut entraîner des risques de blessures graves.

- Nettoyer régulièrement le produit (toutes les joints, et les fixations) avec un chiffon humide et un désinfectant. Ne pas utiliser de produit abrasif, de détergent ou de produits solvantés.
- Sécher avec un chiffon doux propre et sec.
- La chaise doit être révisée chaque année complètement, avec lubrification obligatoire.
- Il est recommandé d'effectuer un entretien du produit au moins une fois par an. Si le produit est soumis à une utilisation intensive et/ou à une utilisation dans un environnement multi-utilisateurs, nous recommandons de le faire réviser plus fréquemment.
- En cas de dysfonctionnement, ne pas réparer le produit soi-même. Consulter un revendeur agréé

Vérifier l'article	À tout moment	Chaque semaine	Tous les mois	Chaque année
Etat et fonctionnement accoudoirs, dossier et siège	X			
Etat et fonctionnement du seau	X			
Goupille de positionnement	X			

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions hors tout	Larg. 45 x prof. 54 cm
Hauteur assise + dossier	de 61 à 76 cm
Poids	5,5 kg
Poids maximum autorisé	100 kg
Hauteur d'assise sol	de 43 à 58 cm

## CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE

Le produit peut être réutilisé. Il doit d'abord être nettoyé et désinfecté en respectant les consignes d'hygiène. Lors du transfert du produit, pensez à remettre tous les documents techniques nécessaires au nouvel utilisateur. Au préalable, le produit devra être inspecté par un spécialiste autorisé.

## RECYCLAGE

Lorsque le produit sera devenu inutilisable et que vous devrez le jeter : veuillez contacter votre revendeur spécialisé. Si vous souhaitez effectuer le recyclage par vous-même, demandez à la société locale de gestion des déchets pour les directives d'élimination.

## STOCKAGE

Le non-respect des conditions de stockage peut entraîner une détérioration du produit et donc des risques de blessures graves

- Ne pas stocker votre produit pendant une période prolongée près d'une source de chaleur ou au soleil (ex : derrière une fenêtre ou près d'un radiateur) ou près d'une source de froid.
- Conserver à l'écart de toute flamme et source d'étincelle.
- Respecter les conditions pour ranger et stocker votre produit.
- Dans un endroit sec et tempéré
- Protéger votre produit par un emballage de la poussière, de la corrosion (ex : éléments abrasifs, sable, eau de mer, air salin).
- Stockez toutes les pièces retirées ensemble, au même endroit (ou repérez-les si nécessaire) pour éviter de les mélanger avec d'autres produits lors du remontage.
- Tous les composants doivent être stockés sans la moindre charge (ne pas déposer d'objets trop lourds sur les éléments du produit ne rien coincer...).

## DUREE D'UTILISATION

La durée de vie prévue de ce produit est de 5 ans en conditions d'utilisation, de sécurité et d'entretien normales pour un utilisateur. Au-delà de cette période, le produit peut être utilisé aussi longtemps tant qu'il est toujours en bon état. Si le produit est utilisé dans un environnement à utilisateurs multiples (maison de retraite ou hôpital), la durée de vie peut être réduite