

Manuel d'utilisation

Chaise de douche SANTORIN

Référence :

SANTORIN

Classification: Dispositif Médical – Classe I

Garantie 2 ans



IMPORTANT

Lire attentivement la notice avant toute utilisation de ce produit et la conserver en cas de besoin.

Utilisateur : si vous êtes dans l'incapacité de lire ou de comprendre les avertissements, précautions ou instructions, veuillez contacter votre professionnel de santé ou distributeur avant d'utiliser ce produit sous peine de risques et de dommages. Consulter votre médecin ou spécialiste de santé avant d'utiliser un dispositif d'aide technique. Il vous conseillera sur son utilisation la plus appropriée à votre cas. Distributeur : cette notice doit être remise aux utilisateurs de ce produit.

DESTINATION DU PRODUIT

La planche de bain SANTORIN est un dispositif médical conçu pour faciliter le transfert dans la baignoire des personnes à mobilité réduite ou en perte d'autonomie. Elle est destinée à un usage en intérieur, dans un environnement humide tel que la salle de bain, hors immersion.

⚠ Son utilisation est strictement réservée à l'installation sur une baignoire standard et elle ne doit en aucun cas être utilisée comme surface de station debout.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Le non-respect des précautions d'emploi peut entraîner des risques de blessures graves.

- Ne dépassez pas la charge maximale autorisée de 136 kg
- Assurez-vous que la planche soit correctement installée et solidement fixée avant chaque utilisation
- Vérifiez la stabilité du produit avant de vous asseoir
- Utiliser uniquement sur une baignoire standard compatible
- Ne jamais se tenir debout sur la planche
- Ne pas sauter ou s'asseoir brusquement sur la planche
- En cas de pièces abîmées, cassées, usées ou manquantes, contactez le revendeur
- Ne pas utiliser le produit sans la poignée si celle-ci est prévue sur le modèle

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions :

- Longueur : 755 mm
- Largeur : 355 mm
- Hauteur : 185 mm



Autres caractéristiques :

- Poids net : 2,8 kg
- Poids maximal supporté : 136 kg
- Matériau : PVC haute résistance
- Fixation réglable pour baignoires standards

QUE CONTIENT LA BOÎTE ?

La boîte contient :

- 1 planche de bain avec poignée intégrée
- 1 système de fixation réglable
- 1 notice d'utilisation

COMMENT MONTER ?

L'installation est simple et ne nécessite aucun outil.

1. Positionner la planche transversalement sur la baignoire
2. Ajuster le système de fixation afin qu'il s'adapte parfaitement à la largeur de la baignoire
3. Serrer les éléments de fixation jusqu'à obtenir une planche stable et immobile
4. Vérifier la stabilité avant utilisation

⚠ La planche doit reposer fermement sur les rebords de la baignoire.

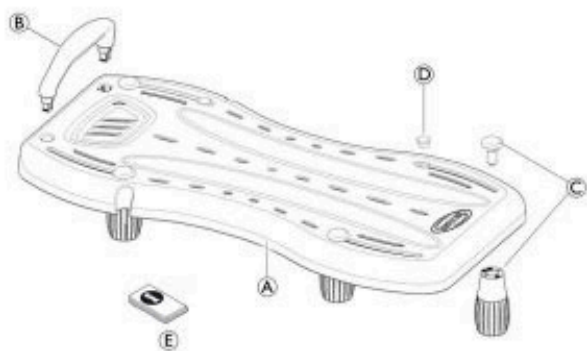


Fig. 1

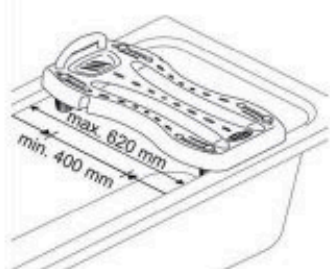


Fig. 3

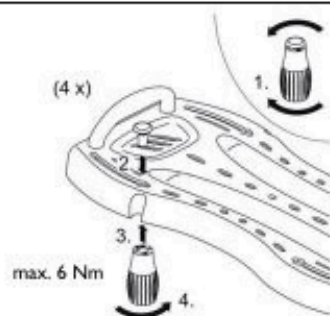


Fig. 5

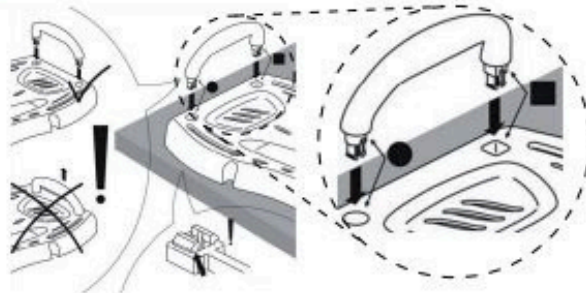
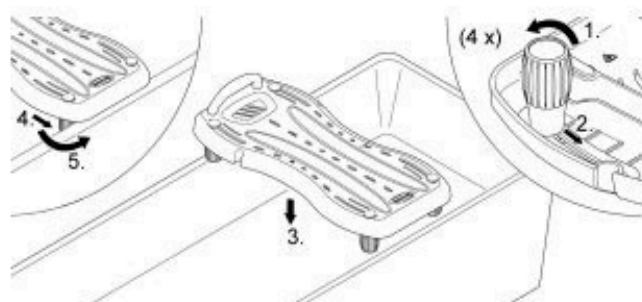


Fig. 4

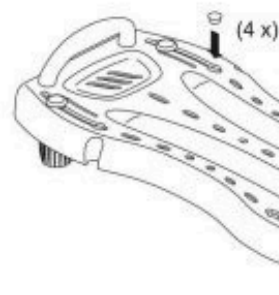


Fig. 6

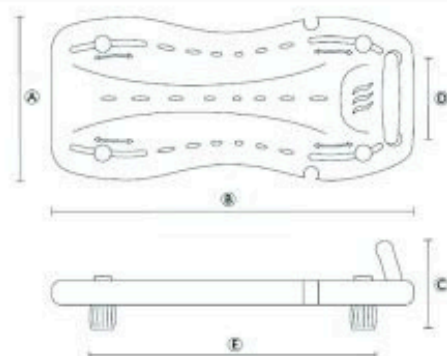
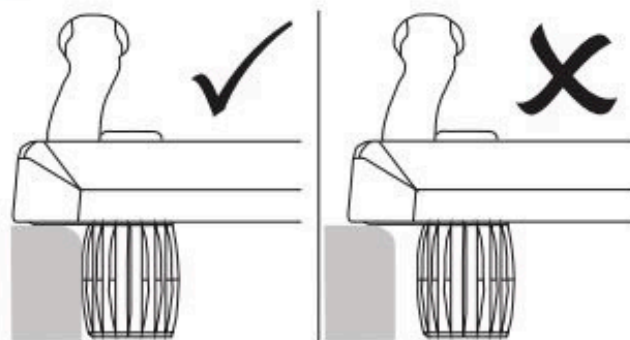


Fig. 9

ENTRETIEN – MAINTENANCE

L'absence d'entretien peut entraîner des risques de blessures graves.

- Nettoyer régulièrement le produit avec de l'eau tiède et un chiffon doux
- Ne pas utiliser de produits abrasifs, détergents ou solvants
- Sécher avec un chiffon propre et sec après nettoyage
- En cas de dysfonctionnement, ne pas réparer le produit soi-même
- Consulter un revendeur ou un professionnel agréé si nécessaire

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

Le produit peut être réutilisé.

Il doit être nettoyé et désinfecté avant toute nouvelle utilisation.

Lors du transfert du produit, tous les documents techniques doivent être remis au nouvel utilisateur.

Une inspection préalable par un spécialiste est recommandée.

STOCKAGE

- Stocker le produit dans un endroit sec et tempéré
- Ne pas exposer à une source de chaleur ou de froid extrême
- Protéger de la poussière, de l'humidité et de la corrosion
- Ne pas poser d'objets lourds sur le produit

RECYCLAGE

Lorsque le produit devient inutilisable, veuillez contacter votre revendeur spécialisé ou votre service local de gestion des déchets pour connaître les modalités de recyclage.

DURÉE D'UTILISATION

La durée de vie prévue de ce produit est de 5 ans, dans des conditions normales d'utilisation, de sécurité et d'entretien.

Au-delà de cette période, le produit peut être utilisé tant qu'il reste en bon état.