

## Manuel d'utilisation

Cadre de toilettes SECURE

### Référence :

SECURE

Classification: Dispositif Médical – Classe I

Garantie 2 ans



## IMPORTANT

Lire attentivement la notice avant toute utilisation de ce produit et la conserver en cas de besoin. Utilisateur : si vous êtes dans l'incapacité de lire ou de comprendre les avertissements, précautions ou instructions, veuillez contacter votre professionnel de santé ou distributeur avant d'utiliser ce produit sous peine de risques et de dommages. Consulter votre médecin ou spécialiste de santé avant d'utiliser un dispositif d'aide technique. Il vous conseillera et informera sur l'utilisation la plus appropriée à votre cas. Distributeur : cette notice doit être remise aux utilisateurs de ce produit.

## DESTINATION DU PRODUIT

Les accoudoirs de toilette SECURE sont des dispositifs d'aide à la toilette destinés aux personnes à mobilité réduite. Ces produits sont destinés à être utilisés à l'intérieur.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Le non-respect des précautions d'emploi peut entraîner des risques de blessures graves.

- Ne dépassez pas la limite maximale de poids de 100 kg.
- Utilisez uniquement les accessoires et les pièces fournies par le fabricant.
- Contrôlez visuellement l'état général du cadre.
- Assurez-vous que l'accoudoir de toilettes soit correctement déplié et que tous les pieds soient ajustés à la même hauteur.
- Assurez-vous que toutes les pièces soient bien fixés et en bon état de fonctionnement.
- N'effectuez aucun réglage sur l'accoudoir de toilettes pendant qu'il est en cours d'utilisation.
- N'utilisez pas l'accoudoir de toilettes sur un escalier ou sur un escalator.
- Assurez-vous de mettre les mains sur chaque poignée afin que le l'accoudoir de toilettes puisse être en position de force parallèle.
- N'utilisez pas l'accoudoir de toilettes comme support de marche.
- N'utilisez pas l'accoudoir de toilettes pour marcher en arrière.
- Toujours s'appuyer sur l'accoudoir de toilettes.
- Installer sur un sol de type carrelage pour les ventouses au sol

## DESCRIPTION DU PRODUIT



## ASSEMBLAGE & UTILISATION

### **ASSEMBLAGE :**

Appuyez fermement sur l'accoudoir de manière à clipser les parties de la barre frontale ensemble. Vous devriez entendre ou sentir un clic indiquant que l'accoudoir est correctement fixé.

Veuillez suivre toutes les instructions mentionnées dans ce manuel d'utilisation lors de l'utilisation des accoudoirs de toilettes KOS. Il en va de votre sécurité.

### **UTILISATION :**

Pour utiliser l'accoudoir placez vos avants bras sur les appuis brachiaux et vos mains sur les poignées. Ajustez la hauteur si besoin. Avancez doucement.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Réglages</b>	<b>Hauteur ajustable : 63 à 82 cm</b> <b>Largeur ajustable : 60 à 73 cm</b>
<b>Accoudoirs</b>	<b>Prolongés pour une meilleure adhérence</b>
<b>Profondeur</b>	<b>47,5 cm</b>
<b>Installation</b>	<b>Sans fixation au sol</b>
<b>Poids maximum supporté</b>	<b>120 kg</b>

## ENTRETIEN - MAINTENANCE

L'absence d'entretien et de maintenance de votre produit peut entraîner des risques de blessures graves.

- Nettoyer régulièrement le produit (toutes les roulettes, les joints, et les fixations) avec un chiffon humide et un désinfectant. Ne pas utiliser de produit abrasif, de détergent ou de produits solvantés.
- Sécher avec un chiffon doux propre et sec.
- La chaise doit être révisée chaque année complètement, avec lubrification obligatoire.
- Il est recommandé d'effectuer un entretien du produit au moins une fois par an. Si le produit est soumis à une utilisation intensive et/ou à une utilisation dans un environnement multi-utilisateurs, nous recommandons de le faire réviser plus fréquemment.
- En cas de dysfonctionnement, ne pas réparer le produit soi-même. Consulter un revendeur agréé.

## CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE

Le produit peut être réutilisé. Il doit d'abord être nettoyé et désinfecté en respectant les consignes d'hygiène. Lors du transfert du produit, pensez à remettre tous les documents techniques nécessaires au nouvel utilisateur. Au préalable, le produit devra être inspecté par un spécialiste autorisé.

## RECYCLAGE

Lorsque le produit sera devenu inutilisable et que vous devrez le jeter : veuillez contacter votre revendeur spécialisé. Si vous souhaitez effectuer le recyclage par vous-même, demandez à la société locale de gestion des déchets pour les directives d'élimination.

## STOCKAGE

Le non-respect des conditions de stockage peut entraîner une détérioration du produit et donc des risques de blessures graves

- Ne pas stocker votre produit pendant une période prolongée près d'une source de chaleur ou au soleil (ex : derrière une fenêtre ou près d'un radiateur) ou près d'une source de froid.
- Conserver à l'écart de toute flamme et source d'étincelle.
- Respecter les conditions pour ranger et stocker votre produit.
- Dans un endroit sec et tempéré
- Protéger votre produit par un emballage de la poussière, de la corrosion (ex : éléments abrasifs, sable, eau de mer, air salin).
- Stockez toutes les pièces retirées ensemble, au même endroit (ou repérez-les si nécessaire) pour éviter de les mélanger avec d'autres produits lors du remontage.
- Tous les composants doivent être stockés sans la moindre charge (ne pas déposer d'objets trop lourds sur les éléments du produit ne rien coincer...).

## DUREE D'UTILISATION

La durée de vie prévue de ce produit est de 5 ans en conditions d'utilisation, de sécurité et d'entretien normales. Au-delà de cette période, le produit peut être utilisé aussi longtemps tant qu'il est toujours en bon état.

