

Manuel d'utilisation

Chaise de douche SEREIN

Référence :

SEREIN

Classification: Medical device Class I

Garantie 2 ans



IMPORTANT

Lire attentivement la notice avant toute utilisation de ce produit et la conserver en cas de besoin.

Utilisateur : si vous êtes dans l'incapacité de lire ou de comprendre les avertissements, précautions ou instructions, veuillez contacter votre professionnel de santé ou distributeur avant d'utiliser ce produit sous peine de risques et de dommages. Consulter votre médecin ou spécialiste de santé avant d'utiliser un dispositif d'aide technique. Il vous conseillera sur son utilisation la plus appropriée à votre cas. Distributeur : cette notice doit être remise aux utilisateurs de ce produit.

DESTINATION DU PRODUIT

La chaise de douche SEREIN est un dispositif médical destiné à assurer une assise stable et sécurisée pendant la douche, pour les personnes à mobilité réduite ou en perte d'autonomie. Elle permet de se doucher confortablement en position assise.

Ce produit est utilisable en intérieur uniquement, dans un environnement humide tel que la salle de bain.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Le non-respect des précautions d'emploi peut entraîner des risques de blessures graves.

- Ne dépassez pas la charge maximale autorisée de 150 kg
- Assurez-vous que le produit soit en bon état de fonctionnement avant chaque utilisation
- Vérifiez que toutes les pièces soient correctement enclenchées
- Vérifiez que les quatre pieds soient réglés à la même hauteur
- Assurez-vous que les patins antidérapants soient correctement positionnés
- Ne jamais se tenir debout sur la chaise
- En cas de pièces abîmées, cassées, usées ou manquantes, contactez le revendeur
- Attention au risque de pincement lors du réglage de la hauteur

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions :

- Largeur totale : 560 mm
- Profondeur totale : 420 mm
- Largeur du siège : 495 mm
- Profondeur du siège : 415 mm
- Hauteur du siège réglable : 800 à 950 mm
- Hauteur des accoudoirs : 220 mm (à partir de l'assise)


Autres caractéristiques :

- Poids net : 4,7 kg
- Poids maximal supporté : 150 kg
- Structure : aluminium haut de gamme
- Assise : polypropylène ajouré

QUE CONTIENT LA BOÎTE ?

La boîte contient :

- 1 assise de chaise de douche
- 1 dossier (selon version)
- 2 accoudoirs (selon version)
- 4 pieds réglables en hauteur
- 4 patins antidérapants
- 1 notice d'utilisation

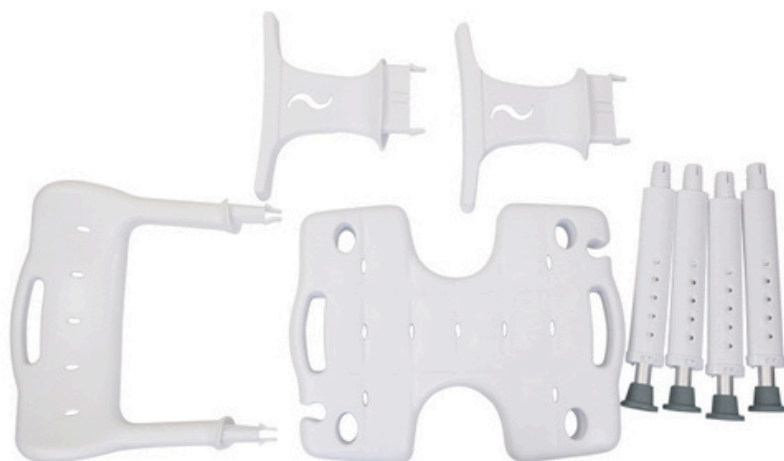

Découvrez les avantages

Grâce à ses pieds robustes réglables en hauteur et à son dossier et ses repose-bras amovibles qui s'emboîtent en douceur, le tabouret/la chaise de douche SEREIN a été conçu(e) pour une utilisation sûre et un ajustement facile.



Ajustement facile

Dossier et repose-bras amovibles et modulaires qui se clipsent en douceur sans outils.

Bonne prise en main

Sans repose-bras, les fentes latérales offrent une prise en main stable et un excellent soutien.

Surface antidérapante

La surface est telle que l'assise est antidérapante et sans danger pour l'utilisateur même lorsqu'elle est humide.

Hauteur réglable

Pieds robustes avec réglage intégré de la hauteur sur 7 positions.

Écoulement intelligent

Des perforations spéciales permettent à l'excédent d'eau de s'écouler rapidement.

Siège flexible

Siège réversible doté d'une large ouverture.

Fiabilité et stabilité

Des embouts antidérapants et sensibles assurent la stabilité du tabouret sur toutes les surfaces.



Tabouret/chaise de douche SEREIN

Une chaise de douche offrant de nombreuses options.

Une chaise SEREIN, trois options

- La version de base de SEREIN est un tabouret. Les fentes latérales offrent une prise en main stable et un excellent soutien.
- En ajoutant des repose-bras, vous bénéficiez d'un soutien supplémentaire pour passer de la position assise à la position debout.
- En ajoutant à la fois des repose-bras et un dossier, vous obtenez une chaise de douche SEREIN qui vous offrira une expérience de douche confortable et sûre.

Deux hauteurs possibles

Le tabouret/la chaise de douche SEREIN est disponible dans deux tailles, toutes deux entièrement réglables. La version basse dispose de quatre positions de réglage différentes et la version haute de sept positions.

Le réglage de la hauteur peut également servir à incliner légèrement la chaise de douche SEREIN vers l'avant. Cette possibilité est particulièrement utile pour les utilisateurs ayant des difficultés à passer de la position assise à la position debout.



Caractéristiques :



Hauteur réglable

La hauteur se règle facilement d'une simple pression. La forme ovale permet d'éviter que les pieds télescopiques ne tournent lors du réglage. Aucun risque d'égarer une pièce.



Ajustement facile

Conception modulaire avec dossier et reposebras amovibles qui s'enclenchent en douceur sans outils. Facile à personnaliser en fonction des besoins de l'utilisateur.

Fiabilité et stabilité

Des embouts antidérapants et sensibles s'adaptent au sol et assurent la stabilité du tabouret sur les surfaces les plus irrégulières.



Facilité d'accès

Un siège réversible doté d'une large ouverture et une surface lisse qui offre un accès aisé et un confort optimal.



CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE

Le produit peut être réutilisé.

Il doit être nettoyé et désinfecté avant toute nouvelle utilisation.

Lors du transfert du produit, tous les documents techniques doivent être remis au nouvel utilisateur.

Une inspection par un spécialiste est recommandée.

RECYCLAGE

Lorsque le produit devient inutilisable, veuillez contacter votre revendeur spécialisé ou votre service local de gestion des déchets pour les modalités de recyclage.

STOCKAGE

- Stocker le produit dans un endroit sec et tempéré
- Ne pas exposer à une source de chaleur ou de froid extrême
- Protéger de la poussière, de l'humidité et de la corrosion
- Ne pas poser d'objets lourds sur le produit

DUREE D'UTILISATION

La durée de vie prévue de ce produit est de 5 ans, dans des conditions normales d'utilisation, de sécurité et d'entretien.

Au-delà de cette période, le produit peut être utilisé tant qu'il reste en bon état.

