

Manuel d'utilisation

Chaise garde de robe Sillage

Référence :

Sillage

Classification: Dispositif Médical – Classe I

Garantie 2 ans



IMPORTANT

Lire attentivement la notice avant toute utilisation de ce produit et la conserver en cas de besoin. Utilisateur : si vous êtes dans l'incapacité de lire ou de comprendre les avertissements, précautions ou instructions, veuillez contacter votre professionnel de santé ou distributeur avant d'utiliser ce produit sous peine de risques et de dommages. Consulter votre médecin ou spécialiste de santé avant d'utiliser un dispositif d'aide technique. Il vous conseillera et informera sur l'utilisation la plus appropriée à votre cas. Distributeur : cette notice doit être remise aux utilisateurs de ce produit.

DESTINATION DU PRODUIT

La chaise de toilette sillage est un dispositif médical. C'est une aide technique à la toilette qui s'adresse aux personnes âgées, à mobilité réduite, handicapées, blessées ou qui peuvent perdre facilement l'équilibre.


PRECAUTIONS D'EMPLOI

Le non-respect des précautions d'emploi peut entraîner des risques de blessures graves.

- Ne jamais dépasser le poids maximum supporté de 130 kg.
- Assurez-vous que tous les composants sont sécurisés avant utilisation.
- Assurez-vous que le produit soit en bon état de fonctionnement.
- L'appareil ne convient pas aux utilisateurs qui ne peuvent pas s'asseoir et se tenir debout normalement.
- Contrôlez visuellement le produit.
- Vérifiez la stabilité de la chaise avant utilisation.
- Utilisez uniquement sur un sol plat.
- Ne vous penchez jamais lorsque vous êtes sur la chaise.
- Veuillez ne pas régler la hauteur lorsque l'utilisateur est assis.
- Veuillez ajuster la hauteur avant l'utilisation.
- En cas de pièces abimées, cassées, usées ou manquantes, contactez le revendeur.
- Avant utilisation, veuillez vérifier que tous les éléments de fixation du produit sont bien serrés et assurez-vous qu'il n'y a pas de jeu.
- Il est recommandé d'avoir un accompagnateur lors de l'utilisation de la chaise de toilette.
- Lorsque vous ajustez la hauteur, assurez-vous que la hauteur des quatre pieds est la même et que les goupilles de positionnement sont bien serrées.

Liste des pièces :

1. Accoudoir (y compris les fonctions de structure de l'accoudoir et du tube d'accoudoir)
2. Dossier (y compris les fonctions de structure du dossier et du tube de dossier)
3. Siège de chaise (y compris les fonctions de structure du support de chaise de toilette et du cadre de chaise de toilette)
4. Seau de chaise de toilette
5. Couvercle de seau de chaise de toilette
6. Poignée du seau de chaise de toilette
7. Coussin de dossier Version 12/2025 Page 4 sur 13
8. Coussin de siège (y compris la fonction de structure du couvercle de chaise de toilette)
9. Tube supérieur de jambe
10. Goupille de positionnement
11. Bouchon de tube intérieur
12. Manchon de tube
13. Tube télescopique
14. Embouts de pied

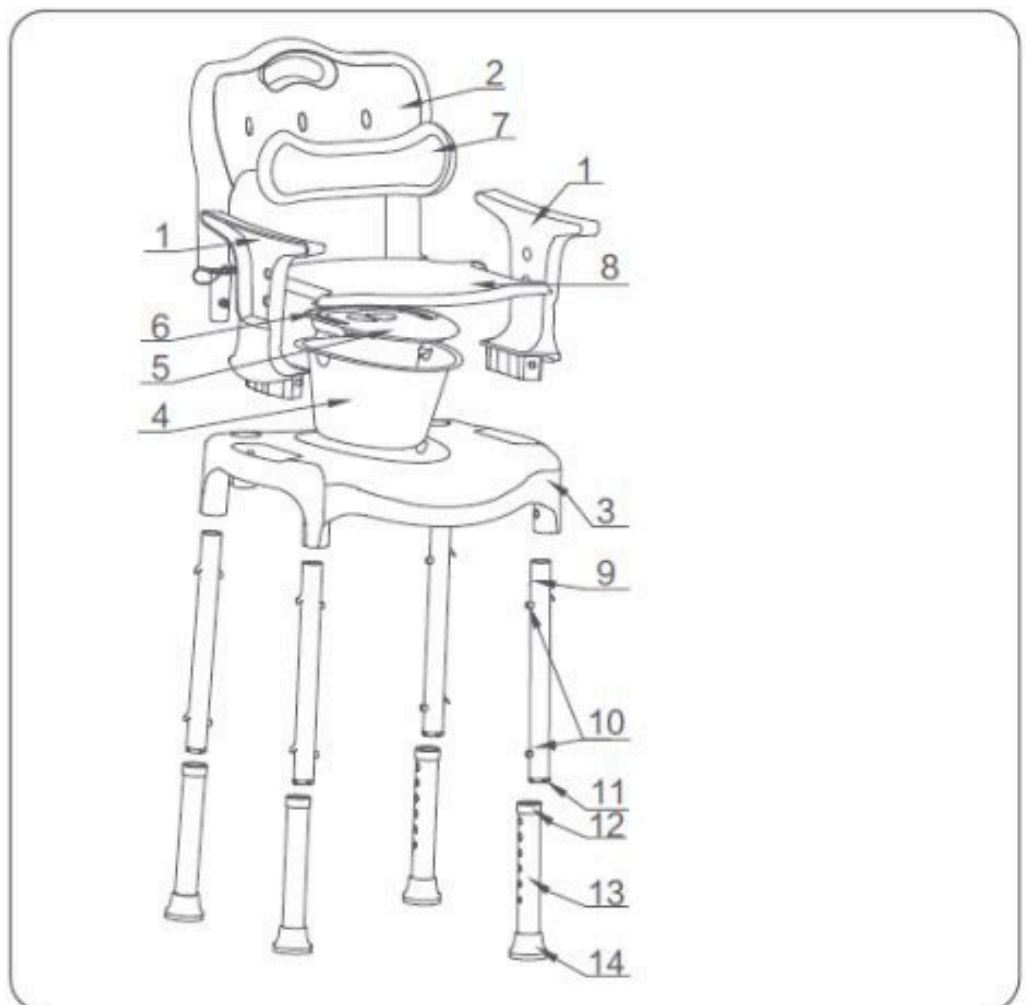

La chaise de toilette a des accoudoirs et des dossiers amovibles, et la hauteur est réglable sur six niveaux.

Réglage de la hauteur : Appuyez sur la tête saillante de la goupille de positionnement (10) d'une main et tenez le tube télescopique (13) de l'autre main, déplacez-le vers le haut et vers le bas pour l'ajuster à une position appropriée, et assurez-vous que les têtes saillantes des goupilles de positionnement (10) des 4 pieds sont solidement fixés aux trous de la même hauteur pour éviter tout danger.

Installation et utilisation de la chaise de toilette 811192 ① Insérez les 4 tubes supérieurs des jambes (9) dans les trous des pieds du siège (3) jusqu'à entendre un "clic". Lorsque la tête saillante de la goupille (10) ressort du trou de positionnement, cela signifie que les tubes des jambes sont installés.

② Insérez l'accoudoir (1) et le dossier (2) dans les trous de fixation du siège (3) de la même manière que l'étape ① jusqu'à entendre un "clic". Lorsque la tête saillante de la goupille unique ressort du trou de positionnement, cela signifie que les tubes des jambes sont installés.

③ Placez les composants du seau de toilette (4)(5)(6) dans le trou central du siège (3), puis mettez en place le coussin de siège (8).

④ Fixez le coussin de dossier (7) dans les 3 petits trous ovales du dossier (2). L'installation est maintenant terminée et elle peut être utilisée normalement.

⑤ Lors de l'utilisation de la fonction de toilette, veuillez retirer le coussin de siège (8) et le couvercle de la chaise de toilette (5), et remettez-les en place après utilisation pour éviter les mauvaises odeurs des selles et de l'urine ; lors de l'utilisation de la fonction de bain (sauf pour la chaise de toilette 811192, il est recommandé de retirer les composants du seau de toilette (4)(5)(6).

⑥ Lors de l'utilisation de la chaise de toilette 811192, serrez d'abord les quatre roulettes (15). Une fois que l'utilisateur est assis solidement, relâchez le frein à pied, et l'aidant/tuteur peut la pousser pour la déplacer.

Enlèvement de l'accoudoir et du dossier : Deux personnes sont nécessaires. Une personne appuie sur l'accoudoir (1) et sur la goupille qui dépasse en bas du dossier (2) avec les deux mains, l'autre personne maintient et soulève légèrement l'accoudoir (1) et le dossier (2) pour les retirer.

ENTRETIEN - MAINTENANCE

L'absence d'entretien et de maintenance de votre produit peut entraîner des risques de blessures graves.

- Nettoyer régulièrement le produit (toutes les roulettes, les joints, et les fixations) avec un chiffon humide et un désinfectant. Ne pas utiliser de produit abrasif, de détergent ou de produits solvants.
- Sécher avec un chiffon doux propre et sec.
- La chaise doit être révisée chaque année complètement, avec lubrification obligatoire.
- Il est recommandé d'effectuer un entretien du produit au moins une fois par an. Si le produit est soumis à une utilisation intensive et/ou à une utilisation dans un environnement multi-utilisateurs, nous recommandons de le faire réviser plus fréquemment.
- En cas de dysfonctionnement, ne pas réparer le produit soi-même. Consulter un revendeur agréé

Vérifier l'article	À tout moment	Chaque semaine	Tous les mois	Chaque année
Etat et fonctionnement accoudoirs, dossier et siège	X			
Etat et fonctionnement du seau	X			
Goupille de positionnement	X			

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions hors tout	Larg. 54 x prof. 50 x haut. 75 à 87 cm
Dimensions assise	Larg. 46 x prof. 43 x haut. 42 à 54,5 cm en 6 positions
Poids	5,2 kg
Poids maximum autorisé	130 kg

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE

Le produit peut être réutilisé. Il doit d'abord être nettoyé et désinfecté en respectant les consignes d'hygiène. Lors du transfert du produit, pensez à remettre tous les documents techniques nécessaires au nouvel utilisateur. Au préalable, le produit devra être inspecté par un spécialiste autorisé.

RECYCLAGE

Lorsque le produit sera devenu inutilisable et que vous devrez le jeter : veuillez contacter votre revendeur spécialisé. Si vous souhaitez effectuer le recyclage par vous-même, demandez à la société locale de gestion des déchets pour les directives d'élimination.

STOCKAGE

Le non-respect des conditions de stockage peut entraîner une détérioration du produit et donc des risques de blessures graves

- Ne pas stocker votre produit pendant une période prolongée près d'une source de chaleur ou au soleil (ex : derrière une fenêtre ou près d'un radiateur) ou près d'une source de froid.
- Conserver à l'écart de toute flamme et source d'étincelle.
- Respecter les conditions pour ranger et stocker votre produit.
- Dans un endroit sec et tempéré
- Protéger votre produit par un emballage de la poussière, de la corrosion (ex : éléments abrasifs, sable, eau de mer, air salin).
- Stockez toutes les pièces retirées ensemble, au même endroit (ou repérez-les si nécessaire) pour éviter de les mélanger avec d'autres produits lors du remontage.
- Tous les composants doivent être stockés sans la moindre charge (ne pas déposer d'objets trop lourds sur les éléments du produit ne rien coincer...).

DUREE D'UTILISATION

La durée de vie prévue de ce produit est de 5 ans en conditions d'utilisation, de sécurité et d'entretien normales pour un utilisateur. Au-delà de cette période, le produit peut être utilisé aussi longtemps tant qu'il est toujours en bon état. Si le produit est utilisé dans un environnement à utilisateurs multiples (maison de retraite ou hôpital), la durée de vie peut être réduite