

Manuel d'utilisation

Chaise garde de robe Solea

Référence :

Solea

Classification: Dispositif Médical – Classe I

Garantie 2 ans



IMPORTANT

Lire attentivement la notice avant toute utilisation de ce produit et la conserver en cas de besoin. Utilisateur : si vous êtes dans l'incapacité de lire ou de comprendre les avertissements, précautions ou instructions, veuillez contacter votre professionnel de santé ou distributeur avant d'utiliser ce produit sous peine de risques et de dommages. Consulter votre médecin ou spécialiste de santé avant d'utiliser un dispositif d'aide technique. Il vous conseillera et informera sur l'utilisation la plus appropriée à votre cas. Distributeur : cette notice doit être remise aux utilisateurs de ce produit.

DESTINATION DU PRODUIT

La chaise de toilette solea est un dispositif médical. C'est une aide technique à la toilette qui s'adresse aux personnes âgées, à mobilité réduite, handicapées, blessées ou qui peuvent perdre facilement l'équilibre.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Le non-respect des précautions d'emploi peut entraîner des risques de blessures graves.

- Ne jamais dépasser le poids maximum supporté de 130 kg.
- Assurez-vous que tous les composants sont sécurisés avant utilisation.
- Assurez-vous que le produit soit en bon état de fonctionnement.
- L'appareil ne convient pas aux utilisateurs qui ne peuvent pas s'asseoir et se tenir debout normalement.
- Contrôlez visuellement le produit.
- Vérifiez la stabilité de la chaise avant utilisation.
- Utilisez uniquement sur un sol plat.
- Ne vous penchez jamais lorsque vous êtes sur la chaise.
- Veuillez ne pas régler la hauteur lorsque l'utilisateur est assis.
- Veuillez ajuster la hauteur avant l'utilisation.
- En cas de pièces abimées, cassées, usées ou manquantes, contactez le revendeur.
- Avant utilisation, veuillez vérifier que tous les éléments de fixation du produit sont bien serrés et assurez-vous qu'il n'y a pas de jeu.
- Il est recommandé d'avoir un accompagnateur lors de l'utilisation de la chaise de toilette.
- Lorsque vous ajustez la hauteur, assurez-vous que la hauteur des quatre pieds est la même et que les goupilles de positionnement sont bien serrées.



L'illustration du fauteuil montre :

A	Dossier
B	Accoudoir (rabattable)
C	Boulon d'arrêt
D	Cadre de fauteuil avec barres
E	Siège en polyuréthane avec ouverture
F	Siège de douche
G	Fauteuil de toilettes
I	Embouts ventouses
K	Coussin du siège en polyuréthane (amovible)
T	Pieds de support / hauteur du siège réglables en hauteur
V	Seau de toilette avec couvercle
W	Support de seau
Z	Plaque signalétique du produit

Montage

Le produit est livré prémonté dans un carton. Les procédures de montage suivantes sont à effectuer avant la mise en service :

1. Faire basculer l'accoudoir vers l'arrière, insérer le dossier dans les tubes du corps du fauteuil et les faire glisser jusqu'à la butée sur le cadre



2. Faire de nouveau basculer les accoudoirs vers l'avant jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent dans l'encoche au niveau du dossier, de même pour le boulon d'arrêt dans le cadre (voir également 10.3).



3. Pour les fauteuils avec un réglage en hauteur, la hauteur du siège se trouve au niveau le plus bas lors de la livraison (position initiale). Régler éventuellement la hauteur du siège (voir également : 10.6).

Fonctionnement du fauteuil

Avant l'utilisation, s'assurer que le fauteuil se trouve dans un état convenable.

10.1 S'asseoir Avant de s'asseoir, veiller à la bonne stabilité du fauteuil pour éviter tout glissement et basculement, à ce que les accoudoirs soient correctement enclenchés et que le siège de douche et de toilettes soit fermement fixé.



Le patient doit se placer le plus près possible du fauteuil. Le patient doit s'asseoir lentement sur le coussin en s'appuyant sur les deux accoudoirs. Si son handicap empêche cette opération, il doit être aidé par un soignant. Si nécessaire, il est opportun d'utiliser une sangle de relevage ou un lèvepersonne.



Prudence . risque de chute ! Il faut éviter tout glissement sur le siège du fauteuil. Le patient doit si possible être assis sur toute l'assise, pas seulement sur le bord. Après s'être assis, s'appuyer complètement contre le dossier.

Avant l'utilisation, s'assurer que le fauteuil se trouve dans un état co10.2 Se lever
Avant de se lever, veiller à la bonne stabilité du fauteuil pour éviter tout glissement et basculement et à ce que les accoudoirs soient correctement enclenchés.


Le patient doit bouger vers l'avant de l'assise, jusqu'à ce que ses pieds touchent le sol.



Il peut désormais appuyer ses bras sur les accoudoirs et se lever lentement de son siège. Ne pas trop pencher le corps vers l'avant afin d'éviter toute chute. Le patient doit laisser le personnel soignant l'aider à se lever.

10.3 Faire basculer les accoudoirs En retirant les boulons d'arrêt (A), le système de blocage est déverrouillé et les accoudoirs peuvent basculer vers l'arrière. En relevant l'accoudoir, vérifier le logement correct du dispositif d'enclenchement au niveau du dossier (B) et du boulon d'arrêt (A)

Prudence : risque de pincement ! Le basculement des accoudoirs s'effectue grâce à une opération à deux mains. Pendant toute l'opération de basculement, maintenir les boulons d'arrêt (A) et amener l'accoudoir en position (C) avec l'autre main. Toucher uniquement la partie extérieure, ne pas saisir de surface à l'intérieur de l'accoudoir ni passer à travers.

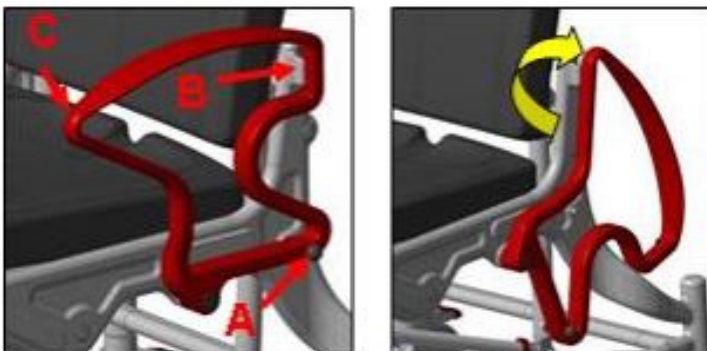

Contrôler régulièrement le verrouillage, car le fonctionnement peut être limité par d'éventuels dépôts calcaires au niveau du système de blocage.

10.4 Retirer le siège de douche et de toilettes

En le soulevant, le siège peut être retiré de sa trame au niveau du cadre du fauteuil pour être nettoyé ou remplacé.

10.5 Manipuler le seau de toilette

Glisser le seau de toilette sous le fauteuil depuis l'arrière du siège. Pour l'enlever, soulever légèrement le seau et le retirer ensuite par l'arrière. Sur les modèles avec siège de toilette en deux parties, il est également possible d'insérer ainsi que de retirer le seau de toilette par le haut en soulevant la lunette.

Prudence : risque de basculement ! Veiller à régler les quatre supports de roue à la même hauteur et à serrer les vis à la main.

Entretien

Pour l'entretien, utiliser un produit nettoyant et désinfectant doux standard (voir Recommandation page 8). Après le nettoyage, rincer à l'eau claire et sécher le fauteuil avec un chiffon.

N'utiliser aucun produit abrasif ni aucun produit nettoyant (respecter les remarques produit !) contenant des solvants agressifs (acides, essence, diluants) ou objet de nettoyage dur (brosses), car cela endommagerait la surface en plastique ou pourrait favoriser la formation de dépôts au niveau des pièces en plastique et d'autres matériaux.

Conserver le produit propre et le nettoyer régulièrement. Dans les domaines sensibles, veiller particulièrement à l'hygiène.

Maintenance, réparation

Une usure non constatée à temps et/ou une manipulation non conforme ainsi qu'une maintenance irrégulière voire l'absence de maintenance peuvent éventuellement être à l'origine d'accidents.

Nous rappelons que la maintenance du fauteuil doit être effectuée de manière professionnelle une fois par an minimum pour des raisons de sécurité et pour éviter tout accident. (Référence à la loi allemande relative aux dispositifs médicaux (MPG) et à l'ordonnance allemande relative aux exploitants de dispositifs médicaux (MPBetreibV))

Maintenance

Des contrôles techniques de sécurité réguliers sont nécessaires :

- Vérifier l'absence de dommages visibles sur les produits (fissures, ruptures, pièces desserrées)
- Vérifier le serrage suffisant de tous les raccords vissés (en particulier ceux des supports de roue et du cadre)
- Vérifier le fonctionnement des accoudoirs et des boulons d'arrêt
- Vérifier le fonctionnement du repose-pied (remplacer les repose-pieds défectueux)
- Vérifier la qualité de roulement et le fonctionnement des roues (remplacer les roues défectueuses) Inspecter l'accessoire à la recherche de défauts

Réparation

En cas de questions concernant la maintenance du fauteuil, s'adresser à un revendeur ou à un fournisseur de matériel médical.

- En cas de dommages et/ou de réparations nécessaires, contacter immédiatement le revendeur.
- N'effectuer aucune modification ou transformation sur le fauteuil soi-même. Cela compromet la sécurité et le fonctionnement du fauteuil.
- En cas de réparation, seules les pièces de rechange d'origine du fabricant doivent être utilisées. Respecter les remarques concernant la garantie commerciale et la garantie légale.
- Après une maintenance ou une réparation, effectuer un nettoyage avant toute utilisation pour des raisons d'hygiène.
- Respecter les remarques concernant la commande de pièces de rechange, la réutilisation et la durée de vie du fauteuil.