

Manuel d'utilisation

Cadre de toilettes ZEN

Référence :

ZEN

Classification: Dispositif Médical – Classe I

Garantie 2 ans



IMPORTANT

Lire attentivement la notice avant toute utilisation de ce produit et la conserver en cas de besoin. Utilisateur : si vous êtes dans l'incapacité de lire ou de comprendre les avertissements, précautions ou instructions, veuillez contacter votre professionnel de santé ou distributeur avant d'utiliser ce produit sous peine de risques et de dommages. Consulter votre médecin ou spécialiste de santé avant d'utiliser un dispositif d'aide technique. Il vous conseillera et informera sur l'utilisation la plus appropriée à votre cas. Distributeur : cette notice doit être remise aux utilisateurs de ce produit.

DESTINATION DU PRODUIT


L'appui de toilettes Lumex est un dispositif médical. C'est une aide technique à la toilette qui s'adresse aux personnes âgées, à mobilité réduite, handicapées, blessées ou qui peuvent perdre facilement l'équilibre. Il permet de vous asseoir et de vous relever en toute sérénité en prenant appui sur les accoudoirs stables et sûrs. Il s'installe sous votre lunette existante.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Le non-respect des précautions d'emploi peut entraîner des risques de blessures graves.

- Ne dépassez pas la limite de poids maximale de 110 kg
- Assurez-vous que toutes les pièces soient fournies et en bon état de fonctionnement
- Assurez-vous que le produit soit correctement installé et verrouillé sur les toilettes avant de l'utiliser
- En cas de pièces abimées, cassées, usées ou manquantes, contactez le revendeur.

DESCRIPTION DU PRODUIT

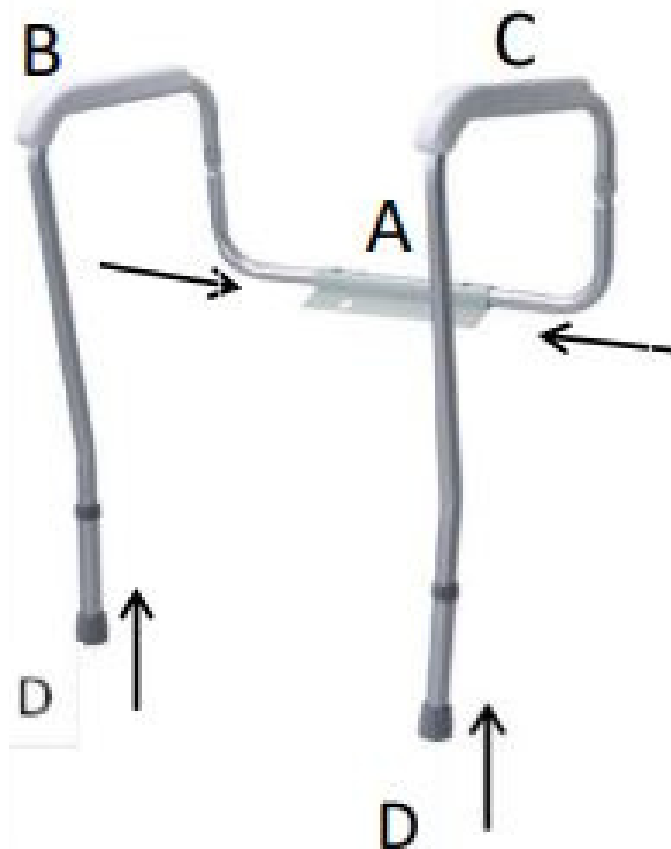

A : Plaque de fixation

B : Accoudoir droit

C : Accoudoir gauche

D : Pieds réglables


PRECAUTIONS D'EMPLOI

Le non-respect des précautions d'emploi peut entraîner des risques de blessures graves.

- Ne dépassez pas la limite de poids maximale de 110 kg
- Assurez-vous que toutes les pièces soient fournies et en bon état de fonctionnement
- Assurez-vous que le produit soit correctement installé et verrouillé sur les toilettes avant de l'utiliser
- En cas de pièces abimées, cassées, usées ou manquantes, contactez le revendeur.

UTILISATION

1. Insérer les accoudoirs B et C dans les pieds D. Ajuster à la hauteur voulue.
2. Fixer la plaque-support A au même emplacement que l'abattant. (Utiliser les mêmes fixations)

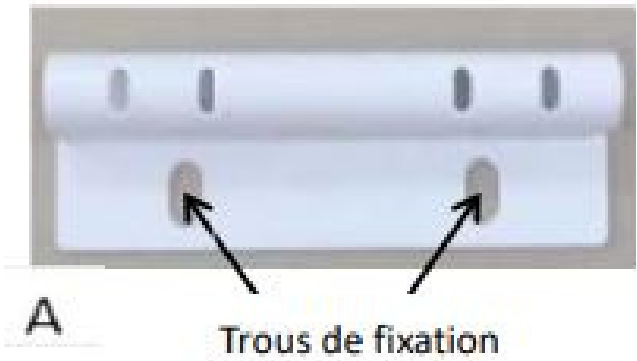

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Largeur entre les accoudoirs	47/55 cm
Largeur hors tout	57/65 cm
Hauteur réglable	Hauteur réglable de 71.5 à 81.5 cm
Poids	1,6 kg
Poids maximum supporté	110 kg



CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE

Le produit peut être réutilisé. Il doit d'abord être nettoyé et désinfecté en respectant les consignes d'hygiène. Lors du transfert du produit, pensez à remettre tous les documents techniques nécessaires au nouvel utilisateur. Au préalable, le produit devra être inspecté par un spécialiste autorisé.

RECYCLAGE

Lorsque le produit sera devenu inutilisable et que vous devrez le jeter : veuillez contacter votre revendeur spécialisé. Si vous souhaitez effectuer le recyclage par vous-même, demandez à la société locale de gestion des déchets pour les directives d'élimination.

STOCKAGE

Le non-respect des conditions de stockage peut entraîner une détérioration du produit et donc des risques de blessures graves

- Ne pas stocker votre produit pendant une période prolongée près d'une source de chaleur ou au soleil (ex : derrière une fenêtre ou près d'un radiateur) ou près d'une source de froid.
- Conserver à l'écart de toute flamme et source d'étincelle.
- Respecter les conditions pour ranger et stocker votre produit.
- Dans un endroit sec et tempéré
- Protéger votre produit par un emballage de la poussière, de la corrosion (ex : éléments abrasifs, sable, eau de mer, air salin).
- Stockez toutes les pièces retirées ensemble, au même endroit (ou repérez-les si nécessaire) pour éviter de les mélanger avec d'autres produits lors du remontage.
- Tous les composants doivent être stockés sans la moindre charge (ne pas déposer d'objets trop lourds sur les éléments du produit ne rien coincer...).

DUREE D'UTILISATION

La durée de vie prévue de ce produit est de 5 ans en conditions d'utilisation, de sécurité et d'entretien normales pour un utilisateur. Au-delà de cette période, le produit peut être utilisé aussi longtemps tant qu'il est toujours en bon état. Si le produit est utilisé dans un environnement à utilisateurs multiples (maison de retraite ou hôpital), la durée de vie peut être réduite.